

QuickTIPS

APPLE WATCH 版 TRULINK アプリ操作ガイド



互換性のある製品: Halo 2、 Halo RIC13、 Halo BTE13

Apple Watch 版 TruLink Hearing Control アプリを使用すると、補聴器を簡単に操作したり、より詳細で個人に合った設定にしたりすることができます。

設定

補聴器は TruLink アプリを通して Apple Watch と通信しています。全ての機能を利用するには、補聴器と Apple Watch の両方が iPhone とのペアリングを維持している必要があります。

Halo および TruLink アプリが使用できる iOS デバイスと iOS のバージョンの最新情報は、
<https://www.starkeyjp.com/product/lp/ha-lo2> の Apps の項目をご参照下さい。

1. 補聴器が **Inspire X** の最新バージョンで調整されていることを確認します。
2. **TruLink Hearing Control アプリ** を App Store からインストールします。
3. iPhone と Apple Watch をペアリングします。ペアリングについては Apple 社の *Apple Watch* を設定する <https://support.apple.com/ja-jp/HT204505> のページをご参照下さい。
4. Apple Watch が iPhone とペアリングされたら、iPhone 内の Watch アプリアイコン  をタップし、画面をスクロールして TruLink アプリを表示します。
5. 「**App を Apple Watch で表示**」を左から右にスライドさせて有効にします。



TruLink アプリのアイコン

ボリュームコントロール

アプリホーム画面の **-** や **+** をタップ、または Apple Watch の Digital Crown (図赤丸) を使用して補聴器のボリュームを調整します。

- » 青色のバーは現在のボリューム位置を表示しています。
- » ボリュームは最大から最小まで 10 段階のステップに分かれています。
- » デフォルトのボリューム位置は、専門家が Inspire で設定します。

ミュート (消音)

補聴器がミュート状態になると、ミュートアイコンが赤色になります。Apple Watch から補聴器をミュート (消音) 状態にする方法は 2 通りあります。:

- » ミュートアイコンをタップ: ミュートを解除すると、最後に設定されたボリューム位置に戻ります。
- » ミュートになるまでボリュームコントロールをタップする: アイコンをタップしてミュートを解除すると、デフォルトのボリューム位置に戻ります。



メモリー、ミュート、
ボリュームコントロール

メモリー変更

現在のメモリー名は TruLink アプリのホーム画面に表示されます。


1. 補聴器に保存されたすべてのメモリーを確認するには、ホーム画面で「**メモリー名**」をタップします。
2. 画面を上下にスワイプまたは Apple Watch の右側面にある Digital Crown を回転させてメモリー一覧をスクロールします。
注意: 専門家が Inspire で作成したメモリーが最初に表示され、その下に、ユーザーが TruLink アプリで作成した TruLink メモリーが表示されます。
3. 希望するメモリーをタップします。
注意: パーソナルメモリーの作成やジオタグの設定は iPhone の TruLink アプリから行います。Apple Watch 版 TruLink アプリから新しいメモリーの作成は出来ません。



補聴器のメモリー

電話

iPhone から着信に応答したり電話を発信する場合: 通話音声は自動的に iPhone から補聴器へストリーミングされます。

Apple Watch から着信に応答したり電話を発信する場合: 通話音声は自動的に iPhone から Apple Watch のスピーカーへストリーミングされます。通話中、iPhone の画面上部に緑色のバーが表示されます。緑色のバーを選択後、「スピーカー」 をタップし、通話音声の出力先を Apple Watch から補聴器に変更します。



Apple Watch の Digital Crown (赤丸)

フォースタッチ

Apple Watch 版 TruLink アプリのホーム画面を指で強く押す（フォースタッチ）と、デフォルトとして設定したメモリーとボリューム位置にリセットされます。

きこえの専門家が Inspire で設定したメモリーをフォースタッチ時のメモリーとして選択することが出来ます。このメモリーは TruLink アプリの設定でユーザーが選択します。

- » TruLink アプリの「**設定**」をタップします。
- » 「**デフォルトのホームメモリー**」をタップして、フォースタッチのデフォルトとして設定したいメモリーを選択します。



フォースタッチ後の画面