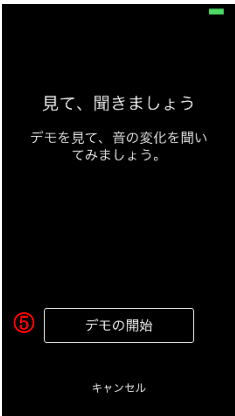
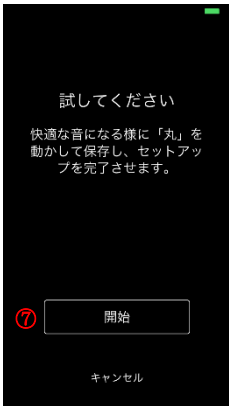
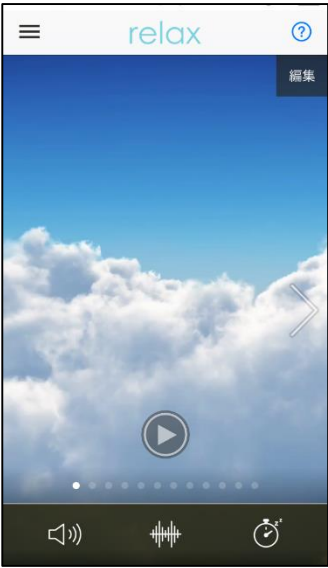



アプリ初回起動時のみ、音のカスタマイズのチュートリアルが提示されます。
以下の手順に従って操作して下さい。

	①アプリを起動します。
	②  を選択し音を提示します。 ③  の  で音量を調整します。 ④ちょうどよいボリューム位置を見つけたら【次へ】を選択します。
	⑤【デモの開始】を選択します。
	⑥ 5秒ほどデモンストラーションが提示されます。

	⑦【開始】を選択します。
	⑧  を動かして音を調整します。 ⑨【保存】を選択します。
	⑩音のイメージ画像を選択します。 ※イメージ画像は12種類あります。 ※  にて、お使いのiOS製品のカメラロール内の画像を選択することもできます。 ⑪【保存】を選択します。

	⑧  を選択し音を再生します。 ※音を一時停止する場合は  を選択します。 ※画面を左に滑らすと音源が切り替わります。 ※音源は 12 種類あります。  …ボリューム 音量の調整をします。  …変調率 音の変調率を調整します。 ・オフ…変調なし ・遅い…20 秒 ・中間…10 秒 ・早い…5 秒  …スリープタイマー 音の自動停止を設定します。 0,10, 15, 30, 45, 60, 90, 120 分間から選択できます。
---	---

◎初回以降アプリを起動すると、メイン画面が表示されます。各アイコンの詳細は以下のとおりになります。

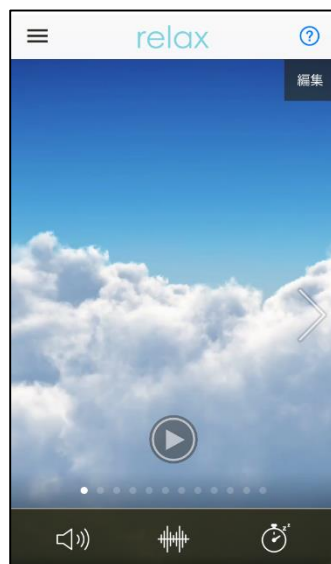

メイン画面

-  … 音の再生、作成のほか、耳鳴りについての知識や情報を学べます。
 - ・再生…音を再生します。
 - ・作成…音を作成します。
 - ・学習…耳鳴りの知識等を学べます。
-  … チュートリアルを開始します。
 - ・チュートリアル…手順②～⑥を開始します。
 - ・キャンセル…選択を中止します。
-  …音の編集をします。
 - ・音の編集…音の編集をします。
 - ・新規作成…新しい好みの音を作成します。
 - ・最初に戻る…音源を 1 番目に移動します。

※新規作成にて作成した音源の場合、【音の編集】【新規作成】の他、以下の選択肢が追加されます。

- ・音の削除 …新規作成にて作成した音を削除します。
【確認】のポップアウト画面にて【消去】を選択してください。
- ・画像の変更…イメージ画像を変更します。