

経験管理

対象製品 Muse、オトレンズ・シナジー、Halo 2

経験管理は最終的にユーザーに必要なゲインから、一定量のゲインを減少させることで、補聴器の調整を簡単にするツールです。このツールは、まだ補聴器で増幅された音に慣れていないユーザーや、他メーカーからスターキーの補聴器に移行したユーザーの助けとなります。

補聴器で増幅された音（ゲイン）を最終的に必要なゲインより減少させることで、補聴器から出力される音の快適性を初期段階から簡単に得られるようになります。また、自動経験管理機能を有効にすることで、使用時間による段階的なゲイン増加によってユーザーを補聴器に慣れさせたり、きこえの専門家による手動での増幅設定の変更もできます。

経験管理は初期フィット時に自動で起動します。ゲインの設定はユーザーの補聴器装用経験を基にカスタマイズされます。経験管理は、自動または手動で設定することができます。

1. Inspire X を起動し、補聴器を接続します。

(詳細は、QuickTIP : Muse&オトレンズ・シナジーまたは Halo 2 の 初回フィッティング手順をご参照下さい。)

初期フィット

新規の補聴器を調整すると、「初期フィット」画面が自動的に起動されます。「補聴器の経験」を選択します。選択肢は以下のとおりです：

- » **補聴器未経験者向けの最小設定:** 補聴器の装用経験がなく、補聴器で増幅された音に慣れていないユーザー向けの設定です。経験管理では「レベル 1: 未経験」として設定されます。
- » **Starkey の経験:** 経験管理では「レベル 3: 未経験」(最終的に必要なゲインの設定)として設定され、スターキーの補聴器で増幅された音に慣れているユーザー向けの設定です。
- » **経験 (他メーカー):** 選択されたメーカーとユーザーの平均聴力レベルに基づいて「レベル 1」から「レベル 4」のいずれかに設定されます。
- » **パワーフィットを選択:** 経験管理では「レベル 4」として設定され、平均聴力レベルを基に処方されたゲインの設定よりも強いゲインの設定を好むユーザー向けの設定です。




補聴器の経験

経験管理

後日フォローアップ調整時に、経験管理の設定を手動で変更するには、左側ナビゲーションメニューの「経験管理」にて、適切な経験レベルを選択します。

【選択肢】

- » **レベル 1:** 未経験
- » **レベル 2:** ベテラン
- » **レベル 3:** 経験豊富(ターゲット通りの設定)
- » **レベル 4:** パワーフィット
- » **T:** 移行 (他メーカーからスターキーの補聴器に移行したユーザー向け設定)
- » **初期フィットを適用:** ベストフィットを実行し、全てのメモリーは初期フィットで選択された経験レベルにリセットされます。

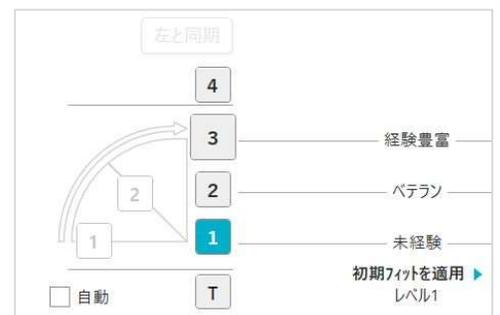

経験管理

注意：経験管理は 1000 クラスの製品で利用することができません。1000 クラスの製品では、クイックフィット画面の「経験レベル」を選択します。

自動経験管理

1. 画面左側のナビゲーションメニューから「**経験管理**」を選択します。
2. 「**自動**」にチェックを入れて「**経験管理**」を有効にします。視覚的なインジケータによって、自動経験管理機能の進捗状況を確認することができます：

- » フィッティンググラフ左上にアイコンが表示されます。
- » 最終的に必要なゲインはフィッティンググラフ上に点線で表示されます。
- » 残りの日数

3. 適切な「**開始レベル**」として「**レベル 1: 未経験**」または「**レベル 2: ベテラン**」のいずれかを選択します。



自動経験管理


4. ドロップダウンメニューから「**合計期間**」を選択します。合計期間は、2 週間、1 ヶ月 (初期設定)、2 ヶ月、3 ヶ月、4 ヶ月、6 ヶ月から選択できます。

5. 自動経験管理の進捗状況は、左側ナビゲーションメニューの「**経験管理**」または「**フィッティングサマリー**」にて確認することができます。Inspire は次の進捗状況をレポートします：

- » 残りの日数 (10 時間 = 1 日として計算)
- » 点線に対する実線の進行状況

6. 自動経験管理を有効にすると 2 つのオプションが有効になります：

- » **一時停止**: 実行中の自動経験管理を一時的に停止させます。
- » **再開**: 「再開」を選択することで、一時停止の状態から自動経験管理を再開します。
- » **リセット**: これまでの自動経験管理の進行を停止して、初期フィットでの設定に戻します。

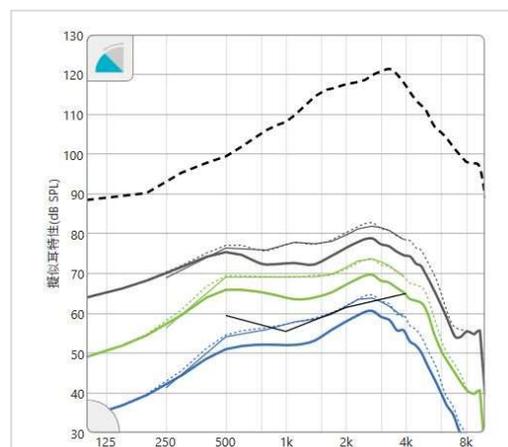

自動経験管理：設定
(フィッティンググラフ上の表示)

注意: 自動経験管理の設定が左右の補聴器で異なる場合、Inspire は進捗状況を記録します。両耳で使用している補聴器の進捗状況が左右で異なる場合は「**左と同期**」と「**右と同期**」ボタンが表示されます。ゲインの設定や残り日数で左右に差がある場合に、補聴器の進捗状況を同期させたいときは、左右どちらかのボタンを 1 つ選択して下さい。

7. 進捗状況が合計期間に達すると「**完了**」が「**経験管理**」画面に表示されます。経験管理画面上のすべての表示は進行が終了したことをお知らせします。残り日数も「**残り 0 日**」と表示されます。