

# QuickTIPS



## TruLink リモコン

### 対象製品: Halo iQ

この資料はTruLinkリモコンについてのQuickTIPsです。Halo iQの調整についての詳細は、**Halo iQ 初回フィッティング手順 QuickTIPs**をご参照下さい。

### Inspireでの設定

補聴器とTruLinkリモコンのペアリングのためにInspire Xでの事前の設定は必要ありませんが、アドバンスモデルの「お気に入りボタン」を使用する場合は、以下の手順が必要になります。

1. 左側ナビゲーションメニューの**アクセサリー**を選択します。
2. **TruLinkデバイス 有効**のチェックボックスに「✓」を入れます。
3. お気に入りボタン設定を選択します。

TruLinkリモコンを使用することで、ユーザーはHalo iQを調整することができます。TruLinkリモコンはアドバンスマデルとベーシックモデルの2種類があります。

TruLinkリモコンは互換性のあるスマホと一緒にHalo iQをペアリングすることができ、両方から操作が可能です。

### 「お気に入りボタン」の選択肢

- » なし
- » コンフォートブースト: 雜音抑制機能をブースト(強化)させます。
- » メモリー4にジャンプ
- » 耳鳴治療音 有効/無効

### ペアリング

以下の手順に従ってTruLinkリモコンとHalo iQをペアリングします。


1. ロックスイッチ(図④)を左にスライドさせます。
2. 補聴器の電池ドアを開閉します。このとき、TruLinkリモコンと補聴器を30cm以内に置きます。
3. ホームボタン(図③)を5秒間長押しすると、左右のLEDが点滅し始め、ペアリングモードになります。
4. ペアリングが成功すると、左耳は青いLED、右耳は赤いLEDが点滅から点灯に変わります。(片耳の場合は、片方どちらかのLEDのみ)  
注意: TruLinkリモコンは片耳か両耳かを認識し、1つまたは2つの補聴器とペアリングします。



アクセサリー画面

### 使い方

- » ① **左右切換えスイッチ:** 両耳で補聴器を操作する場合はスイッチを中央の位置にしてください。  
左右別々に操作する場合は、右または左にスライドしてください。
- » ② **音量切換えボタン:** 上ボタンで音量を上げ、下ボタンで音量を下げます。
- » ③ **ホームボタン:** 補聴器の音量とメモリーの設定を、補聴器の電源を入れたときと同じ状態に戻します。  
また、5秒間押し続けるとペアリングモード(補聴器とリモコンの接続)が開始されます。
- » ④ **ロックスイッチ:** 左にスライドすると「ロック解除」の状態 — ボタンの操作が有効になります。  
右にスライドすると「ロック」状態 — ボタンの操作が無効になります。
- » ⑤ **ミュート(消音)ボタン:** 補聴器のマイクに入ってくる音を一時的にミュート(消音)します。
- » ⑥ **お気に入りボタン:** Inspire Xで選択したお気に入りボタンの設定が有効になります。(上記参照)
- » ⑦ **メモリーカットボタン:** Inspire XでプログラムしたメモリーとTruLinkアプリで作成したメモリーを順番に切換えます。

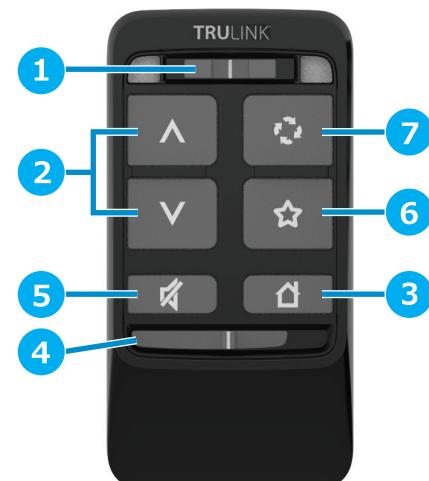

アドバンスマデル  
(ベーシックモデルは①~④のみ)