

アンドロイド版 TRULINK アプリ: 設定手順

互換性のある製品: Halo 2、Halo

TRULINK アプリのインストール

TruLink Hearing Control アプリをアンドロイド端末にインストールするには、Google Play ストアアカウントの取得が必要になります。

Google Play ストアアカウントの取得方法:

1. アンドロイド端末で**基本機能**>**設定**>**アカウント**の順にタップします。
2. **アカウント**>**+アカウントの追加**>**Google**の順にタップします。
3. 画面の指示に従って情報を入力し、アカウントを作成します。

TruLink アプリのインストール方法

1. アンドロイド端末上の**Play ストアアイコン**  をタップします。
2. 検索画面に **TruLink Hearing Control** と入力します。
3. **インストール** をタップし、ホーム画面に戻りアプリがインストールされているか確認します。

HALO 2/HALO とアンドロイド端末のペアリング方法

補聴器は専用ソフトの Inspire で調整した後にアンドロイド端末とペアリングする必要があります。アンドロイド端末と補聴器をペアリングする前に、Inspire が閉じていることをご確認下さい。

1. アンドロイド端末で**基本性能**>**設定**>**Bluetooth**の順にタップします。
2. **Bluetooth** のスライダーを左から右にスライドして有効にします。
3. 「接続可能デバイス」にてペアリングしたい補聴器の名前を選択し、「ペアリング済みデバイス」に切替るまで待機します。
注意: ペアリングには補聴器の電源が入っている必要があります。
4. TruLink アプリを起動します。
5. 「**補聴器選択確認画面**」にて、適切な補聴器名を選択し、チェックマークが表示されましたら「**接続**」をタップします。

注意: アンドロイド端末の電源をオフにし再度電源を入れてアプリを起動するたびに、この1~5の手順を行う必要がある場合があります。

TruLink アプリの使用がサポートされているアンドロイド端末についての最新情報は

<https://www.starkeyjp.com/product/lp/halo2> の Apps の項目をご参照下さい。

注意: アンドロイド端末でのオーディオストリーミングは、現在対応しておりません。



アンドロイド端末とのペアリング



補聴器選択確認画面

電池残量と接続状態の表示

補聴器の電池残量と接続状況はリモート、サウンドスペース、TRT 各画面の右上に表示されています。（電池残量は目安です）

- » 補聴器が接続されている場合、黄色の丸で囲まれた Bluetooth マークが表示されます。
- » 片方または両方の補聴器が未接続の場合、Bluetooth マークがなく、回転している黄色の丸が表示されます。両方の補聴器が切断されている場合は、トラブルシューティングのヒントが表示されます。

設定:情報

「設定」へアクセスするには、リモート画面の左上にあるリストアイコン  > 設定の順にタップします。

説明書: TruLink アプリの全機能の概要を説明するユーザーマニュアルです。説明書は必要に応じてオンラインで随時更新されます。

ヘルプ: 「ヘルプ」をタップすると、具体的なトラブルシューティングの手順が表示されます。

概要: 「概要」をタップすると、TruLink アプリのバージョンを確認できます。

ご意見: 「ご意見」をタップすると、TruLink アプリのレビューを書いたり、ご意見を送信したりすることができます



設定

設定:機能

「設定」へアクセスするには、リモート画面の左上にあるリストアイコン  > 設定の順にタップします。

補聴器を探す: 次の項目を選択して、紛失した補聴器を探します。:

- » **検索:** 約 10m の範囲内にある接続された補聴器を、信号レベルを手掛かりに探します。

注意: 補聴器の電池残量が残っていることが前提です。

- » **マップ:** アンドロイド端末と補聴器が最後に接続していた場所を地図上に表示します。

快適性ブースト: 「快適性ブースト」のスライダーを左から右へスライドさせて有効にすると、リモート画面上に快適性ブーストアイコンが表示されます。詳細はアンドロイド版 TruLink アプリ 4.0 Quick Tips をご参照下さい。

呼び出し音: 「呼び出し音」のスライダーを左から右へスライドさせて有効にすると、電話着信時にお知らせ音が再生されます。

デモモードを保持: 補聴器を接続せずに TruLink アプリを試すには、「デモモードの保持」をタップします。デモモードでは、TruLink アプリの全機能を確認することが出来ます。