

アプリ初回起動時のみ、音のカスタマイズのチュートリアルが提示されます。 以下の手順に従って操作して下さい。

relax Starkey Houring Technologies	①アプリを起動します。
クイックセットアップ 音を再生し、快速なポリュームに調整し ます。 ② 〔2 〕 ③ 〔1 ◎ 〕 〔1 ④ 〕 つぎ ++ンセル	 ② を選択し音を提示します。 ③ ≤ ● ● ● ◎ ○ ○ で音量を 調整します。 ④ ちょうどよいボリューム位置を見つけたら 【つぎ】を選択します。
見て、聞きましょう デモを見て、音の変化を聞いてみましょ う。 (5) デ ¹ モの開始 ++ンセル	⑤【デモの開始】を選択します。
	 ⑥ 5 秒ほどデモンストレーションが 提示されます。



<i>試してください</i> 快適な音になる様に「丸」を動かして保 存し、セットアップを完了させます。	⑦【開始】を選択します。
(戻る) (要) 保存 大きく (日本) (1) (日本) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	 ⑧ ● を動かして音を調整します。 ⑨ 【保存】を選択します。
	 ⑩音のイメージ画像を選択します。 ※イメージ画像は 12 種類あります。 ※ 〇 にて、お使いのアンドロイド製品の ギャラリーの写真を選択することもできます。 ①【保存】を選択します。





◎初回以降アプリを起動すると、メイン画面が表示されます。各アイコンの詳細は以下の とおりになります。



・画像の変更…イメージ画像を変更します。