



1 電池の出し入れ・充電方法

あなたの補聴器の電池タイプはこちらです

- 充電 → Aへ
- 10A (PR536)
- 312 (PR41) → Bへ
- 13 (PR48)

A 充電式 充電方法

補聴器を充電器(チャージャーケース)に設置します。

フェイスプレート(充電端子「+」が付いている面)を下に向けて置きます。自動的に補聴器の電源が切れ、充電が始まります。

表示ランプの状態

- 点滅: 充電中
- 点灯: フル充電

補聴器を充電ポートから取り外すと、自動的に電源が入ります。

B 電池交換式 電池の出し入れ方法

新しい電池のシールをはがす

新しい電池から色付きのシールをはがします。シールを取り外してから3~5分待ってから、電池を挿入します。

※電池に湿気が付いている場合には、拭き取ってから入れてください。

- ① 電池ドアの突起(凸)を爪で引っ掛けてそっと開きます。
- ② 古い電池を取り外します。
- ③ 新しい電池のプラス面(シールが貼られていた面)を上にして、電池ドアにしっかりとのせます。
- ④ 電池ドアを閉じます。

2 耳への着け方

補聴器(左耳/右耳)の確認

青い印字は左耳、赤い印字は右耳の補聴器です。

ブラックの場合

「L」は左耳 「R」は右耳の補聴器です。 L 左耳 R 右耳

ITC / ITE の場合

- ① 耳の穴の前に合わせて、親指と人差し指で補聴器をしっかりと持ち、まっすぐ耳の中に入れてください。
- ② 後方に(背中側)に回しながら外耳道にそっと入れます。
- ③ 指先で、そっと押し込みます。

IIC / CIC の場合

- ① 耳の穴の前に合わせて、親指と人差し指で補聴器をしっかりと持ち、まっすぐ耳の中に入れてください。
- ② 後方に(背中側)に回しながら外耳道にそっと入れます。
- ③ 指先で、そっと押し込みます。

3 耳からの外し方

ITC / ITE の外し方



- テグスあり (IIC/CIC) テグスをつまんで水平(抜けにくい場合、若干後上方)にゆっくり引き出してください。
- テグスなし 耳たぶの裏側から親指で図の矢印のように押し上げ、浮き出た補聴器を指先でつかんで取り出してください。

IIC/CICの外し方



4 充電・保管方法

補聴器を使用していない時、特に就寝時には保管します

充電式

やわらかい布で補聴器を拭いてからふたを閉じて保管します。



※乾燥が必要な場合は、充電式UV除菌乾燥機(別売り)を併用してください。

電池交換式

補聴器の電池は乾燥に弱いため、乾燥ケースに入れるときは、必ず外してください。

電池はふたの上面の電池置きシートに置きます。磁石が付いているので、平らな面(+極)を下にして置いてください。



電池 → ふたの上 補聴器 → 乾燥ケースの中

5 お手入れの仕方

あなたの補聴器で使う 耳垢防止フィルターとマイクカバーはこちらです ※お買い上げの販売店にて定期的な交換をおすすめします。

耳垢防止フィルターは



- ホワイトワックスガード
- スプリング
- フタ式
- ワックスキャップ

マイクカバーは

- 大
- 小
- (カラー)

音の出口の部分やマイクの清掃

音の出口の部分やマイクに耳垢が少しでもついていたら、清掃ブラシを横にしてはらってください。

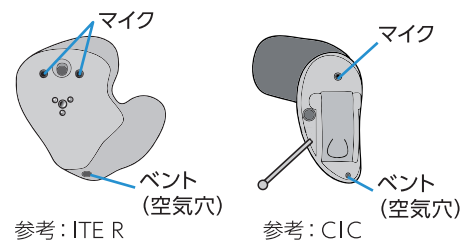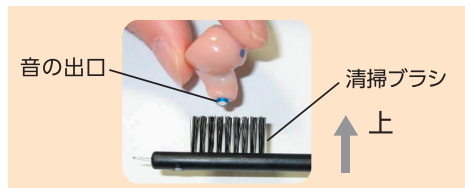

ベント(空気穴)の清掃

ベント(空気穴)が開いている場合には、ブラシを穴にねじりながら差し込んで汚れを取り除いてください。



音の出口にブラシを差し込むと補聴器が故障することがありますのでお止めください。

マイクの穴にホコリや汚れが溜まっていると、補聴器の性能が低下してしまいます。穴に付着しているホコリなどは慎重に取り除いてください。

清掃ブラシの部分に汚れが溜まってきたら交換してください。清掃ブラシは販売店にてご購入いただけます。お掃除が難しい場合は、販売店へご相談ください。

ホワイトワックスガードの交換方法

使い捨てのホワイトワックスガードで、補聴器レシーバーへの耳垢の蓄積を防ぎます。



- ① 新しいスティックを取り出し、端を補聴器の使用済みホワイトワックスガードにまっすぐ挿入します。
- ② スティックをまっすぐ引き出し(ねじらないでください)、使用済みのホワイトワックスガードを取り外します。
- ③ スティックの反対側の端を使用して、きれいなホワイトワックスガードを補聴器にまっすぐしっかりと挿入します。
- ④ スティックを取り外して廃棄するために、まっすぐに引き出します(ねじらないでください)。



### 1 電池の出し入れ・充電方法

あなたの補聴器の電池タイプはこちらです

充電 → **A**へ

312 (PR41) → **B**へ

13 (PR48)

### A 充電式 充電方法

補聴器を充電器(チャージャーケース)に設置します。



耳栓やイヤモールドが本製品の内側に向かって収まるように置きます。自動的に補聴器の電源が切れ、充電が始まります。


表示ランプの状態

- 点滅：充電中
- 点灯：フル充電

補聴器を充電ポートから取り外すと、自動的に電源が入ります。


### B 電池交換式 電池の出し入れ方法

新しい電池のシールをはがす

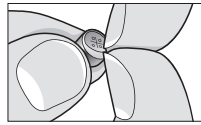


新しい電池から色付きのシールをはがします。シールを取り外してから3~5分待ってから、電池を挿入します。


※電池に湿気がついている場合には、拭き取ってから入れてください。

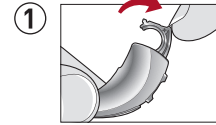



① 電池ドアの取っ手(凹)を爪で引っ掛けてそと開きます。

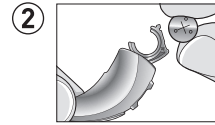

② 古い電池を取り外します。

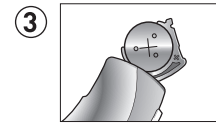

③ 新しい電池のプラス面(シールが貼られていた面)を上にして、電池ドアにしっかりとのせます。

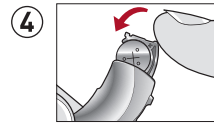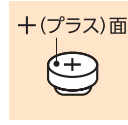


④ 電池ドアを閉じます。

### 2 耳への着け方

補聴器(左耳/右耳)の確認


RIC

レシーバーの先端が青は左耳、赤は右耳の補聴器です。

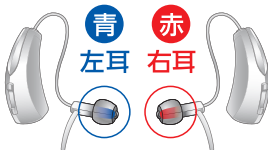

BTE

背面の左右識別バーが青は左耳、赤は右耳の補聴器です。

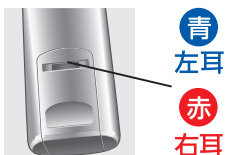

着け方



① 親指と人差し指で、レシーバーの前の曲がり角でケーブルを持ちます。レシーバーを外耳道に挿入します。



② 補聴器を耳の後ろに置きます。

手順が逆(②→①)でも装着できます。扱いやすい手順をお試しください。

あなたの補聴器で使うイヤピースまたはイヤモールドはこちらです

- 既成タイプ(イヤピース)
- シリコンモールド
  - 中空シリコンモールド
  - ヘルリクスモールド
  - オープンチップ
  - クローズチップ
  - スマートチューブシリコンモールド

- カスタムタイプ(イヤモールド)
- BTE 標準チューブ
  - BTE 細チューブ

※お買い上げの販売店にて定期的な交換をおすすめします。

### 3 耳からの外し方

外し方



① 耳の中からイヤピースを取り出してください。



② 補聴器本体を耳の後ろから外してください。


❗ 外す際は、補聴器本体を引っ張らないでください。接続部が損傷する可能性があります。

### 4 充電・保管方法

補聴器を使用していない時、特に就寝時には保管します

充電式

ドライカプセルをチャージャーケースのふた部分にあるホルダーにはさみ、やわらかい布で補聴器を拭いてからふたを閉じて保管します。

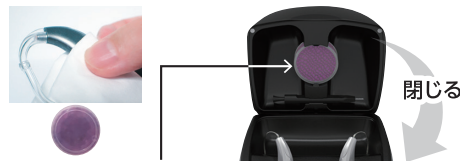

ドライカプセル  
交換目安：約2~3週間  
(青・紫 → 薄ピンク・透明に変化)  
※フタ部分にホルダーがない場合は、充電式UV除菌乾燥機(別売り)を併用してください。

電池交換式

補聴器の電池は乾燥に弱いので、乾燥ケースに入れるときは、必ず外してください。

電池はふたの上面の電池置きシートに置きます。磁石が付いているので、平らな面(+極)を下にして置いてください。



電池 → ふたの上



補聴器 → 乾燥ケースの中

### 5 お手入れの仕方

本体のお手入れ



補聴器本体に水分や汚れが付着した際は、柔らかい布などで、速やかに拭き取ってください。

イヤチップのお手入れ

毎日 お手入れしてください。

付属のブラシや綿棒で耳垢やホコリを取り除いてください。




チップは洗淨しないでください。チップは簡単に交換ができます。汚れたり古くなってきた際は、交換してください。交換が難しい場合は、販売店へご相談ください。

交換方法

チップの取り外し

レシーバーやイヤチューブの根元をしっかり持ち、ひねらずに真っすぐ抜きます。

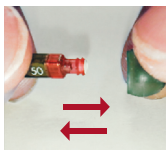

チップの取り付け

チップが抜け落ちないように必ずしっかりと奥まで押し込んでください。

イヤモールドのお手入れ

定期的にお手入れしてください。

やわらかい布で耳垢などを拭き取ってください。




汚れたり古くなってきた際は、交換してください。交換が難しい場合は、販売店へご相談ください。

交換方法

イヤモールドの取り外し

レシーバーやイヤチューブの根元をしっかり持ち、ひねらずに真っすぐ抜きます。

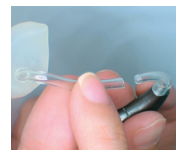

イヤモールドの取り付け

イヤモールドが抜け落ちないように必ずしっかりと奥まで押し込んでください。


ホワイトワックスガードの交換方法

使い捨てのホワイトワックスガードで、補聴器レシーバーへの耳垢の蓄積を防ぎます。




新しいホワイトワックスガード  
取り外し側

① 新しいスティックを取り出し、端を補聴器の使用済みホワイトワックスガードにまっすぐ挿入します。

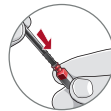

② スティックをまっすぐ引き出し(ねじらないでください)、使用済みのホワイトワックスガードを取り外します。

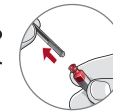

③ スティックの反対側の端を使用して、きれいなホワイトワックスガードを補聴器にまっすぐしっかりと挿入します。



④ スティックを取り外して廃棄するために、まっすぐに引き出します(ねじらないでください)。

