


iOS デバイス版 TRULINK アプリ: 設定手順

互換性のある製品: Halo 2、Halo

TruLink アプリのインストール

TruLink Hearing Control アプリを iOS デバイスにインストールするには、Apple ID の取得が必要になります。Apple ID の作成については <https://appleid.apple.com/account#!&page=create> をご参照下さい。

1. iOS デバイス上の App Store アイコン  をタップします。
2. 検索画面に TruLink Hearing Control と入力します。
3. 入手>インストールの順にタップし、インストールを開始します。

Halo 2/Halo と iOS デバイスのペアリング方法

補聴器は専用ソフトの Inspire で調整した後に iOS デバイスとペアリングする必要があります。iOS デバイスと補聴器をペアリングする前に Inspire が閉じていることをご確認下さい。

1. iOS デバイスの「設定アイコン」  をタップします。
2. 一般>アクセシビリティ>ヒアリングデバイスの順に進みます。
3. iOS デバイスの Bluetooth が有効になっているか確認します。
4. お手持ちの補聴器の電池ドアを開閉して下さい。
注意: 補聴器の電源をオンの状態にします。
5. 適切な「補聴器名」をタップして補聴器と iOS デバイスを接続します。
6. 各補聴器の「ペアリング要求」を選択して下さい
注意: 両耳装用の場合、2つのペアリング要求が表示されます。
7. ペアリングが完了すると、補聴器名の前に「黒色のチェックマーク」が表示されます。
8. TruLink アプリを起動します。

TruLink アプリの使用がサポートされている iOS 製品と iOS のバージョンについての最新情報は <https://www.starkeyjp.com/product/lp/halo2> の Apps の項目をご参照下さい。

注意: Halo2、Halo は最大 5 つの iOS デバイスに認識されますが、1 度にペアリング可能な iOS デバイスは 1 台のみになります。そのため、必ずペアリングしない iOS デバイスの Bluetooth 機能をオフにした状態でペアリングを開始して下さい。



iOS デバイスとのペアリング状態

設定: 情報

TruLink アプリ画面上的「歯車アイコン」  をタップして「設定」にアクセスします。

説明書: TruLink アプリの全機能の概要を説明するユーザーマニュアルです。
説明書は必要に応じてオンラインで随時更新されます。

ヘルプ: 「ヘルプ」をタップすると、具体的なトラブルシューティングの手順が表示されます。

概要: 「概要」をタップすると、TruLink アプリのバージョンを確認できます。

ご意見: 「ご意見」をタップすると、TruLink アプリのレビューを書いたり、ご意見を送信したりすることができます。

設定:機能

「設定」へアクセスするには、TruLink アプリの「歯車アイコン」 をタップします。

リモートマイク: 「リモートマイク」をタップすると、iOS デバイスのマイクに入った音声を直接補聴器に送ります。音声を録音し、録音したファイルをメールに添付して送信できます。

補聴器を探す: 次の項目を選択して紛失した補聴器を探します:

- » **検索:** 約 10m の範囲内にある接続された補聴器を、信号レベルを手掛かりに探します。
- 注意:** 補聴器の電池残量が残っていることが前提です。
- » **マップ:** iOS デバイスと補聴器が最後に接続していた場所を地図上に表示します。

アラート: 「アラート」をタップすると、Apple プッシュ通知サービス機能を有効にしたアプリの通知音（アラート）を再生します。詳細は下記アラートの項目をご参照下さい。

デフォルトのホームメモリー: 「デフォルトのホームメモリー」をタップすると、きこえの専門家が作成したメモリーを基準のメモリーとして設定することが出来ます。

自動ストリーミング: 「自動ストリーミング」は、初期設定で有効になっており、音楽や電話などがストリーミングされると、補聴器のメモリーは自動的に「Stream Boost (ストリームブースト)」メモリーに切り換ります。

コンフォートブースト表示: 「コンフォートブースト表示」のスライダーを左から右にスライドすると、リモート画面上にコンフォートブーストアイコンが表示されます。詳細は iOS 版 TruLink アプリ 4.0 QuickTips をご参照下さい。

デモモードを保持: 快適性ブーストのスライダーを左から右へスライドさせて有効にすると、リモート画面上に快適性ブーストアイコンが表示されます。詳細は iOS 版 TruLink アプリ 4.0 Quick Tips をご参照下さい。

アラート (Halo2 のみ)


新着 E メール、予定のリマインダー、新着メッセージ、ソーシャルメディアアプリ (Facebook、Twitter) など Apple 通知サービス機能を有効にしたアプリの通知音（アラート）を補聴器で再生します。

1. TruLink アプリ画面上の「歯車アイコン」 をタップします。
2. 「アラート」を選択し、「アラート」を右にスライドして有効にします。

注意: アラートを有効にしても通知音が再生されない場合は、iOS デバイスの設定 > 通知 > 通知スタイルにて設定したいアプリを選択し、「通知センターに表示」を有効にする必要があります。



設定

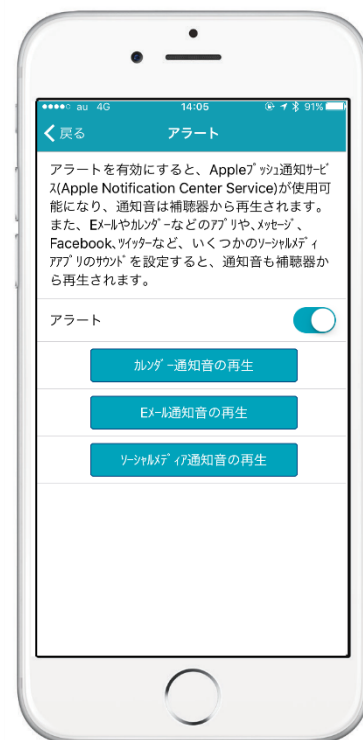

アラート