



試聴

フィッティングの手順

1 音響オプション

※ 耳栓の種類選択のため


- 画面中央「音響オプション」をクリック
- イヤピース「耳栓」
- 耳栓の種類「クローズイヤチップ」(or オープンイヤチップ)



2 ベストフィット

※ 自動調整のため

- 画面中央「ベストフィット」をクリック
- 「現在のメモリーをベストフィット」を選択

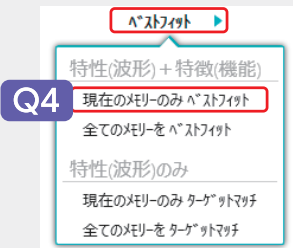

3 クイックフィット／経験管理

※ 大まかな音量調整のため


- 「クイックフィット」で「全体ゲイン」or「最大出力」を調整
- ※ 補聴器経験が初の場合は「経験管理」⇒「1:未経験」をクリック



4 ユーザーコントロール

※ お客様が行う操作設定のため

- 「ユーザーコントロール」をクリック
- 変更する場合は「左の青色項目」⇒「右のボタン操作」をクリック
- 無効にする場合は「⊗」ボタン
- ※ 試験の場合すべて無効でOK (注:PC調整中はボタン操作不能)

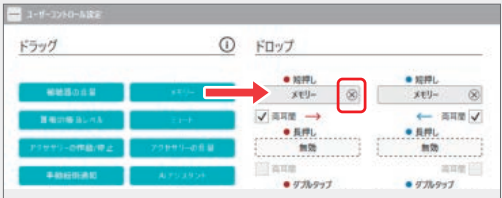

5 サウンドマネージャー／環境管理

※ 機能確認とランク設定のため

- 「サウンドマネージャー」の「会話強調」「環境管理」「指向性」確認

※ クラス別の設定数値：

2400 ▶ 3

2000 ▶ 2


1600 ▶ 1 (オン)

	1	2	3	4	5
会話強調	ON	ON	OFF	OFF	OFF
環境管理	ON	ON	OFF	OFF	OFF
指向性	ON	ON	OFF	OFF	OFF

6 お知らせ音

※ 補聴器の操作音設定と電池交換の合図確認のため


- 「お知らせ音」の有効項目の✓ 確認 (無効にするには✓外す)
- お知らせ音の言語は「日本語－女性 or 男性」をオススメ
- 「電池交換」を選択、実際の音を試聴するのでデモ をクリック

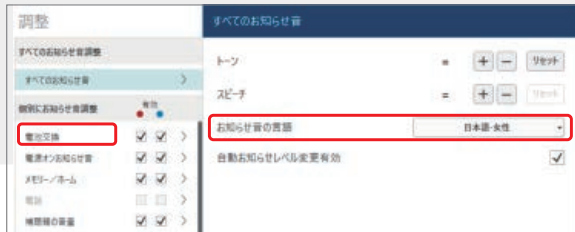

7 保存

※ 調整内容をパソコン内に保存するため

- 調整内容をパソコン内に保存するので、 をクリック
- ※ 補聴器本体の調整内容は自動的に常に保存されるため安心です

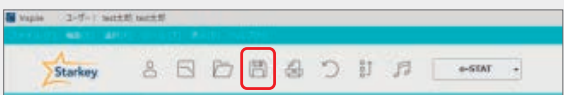

【 EX 】フィードバックキャンセラー

※初期フィット時に初期化済み

※ ハウリング抑制機能をお客様に合わせるため

- フィードバックの初期化をするために「開始」をクリック


アダプティブ 高感度

アダプティブ 低感度

OFF

- ※ 音質に違和 感がある場合、低感度を試みましょう (低感度にしてもハウリング抑制の強さに影響はありません)

必ず初期化 しましょう

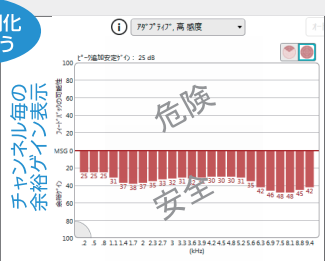

【 EX 】ユーザーツール

※ 補聴器本体の診断のため (Livioのみ)

注意：静かな状態で補聴器を平らな場所に **耳栓上向き** に置くこと


- 「ユーザーツール」画面で「基本設定」をクリック
- 補聴器本体の診断テストは **テスト開始** ⇒ **OK** =異常なし



再調整のテクニック

Q1 補聴器の出力をリアルタイムで確認する場合は？

- 画面中央「スピーチマッピング」をクリック
- ※ 入力、 or ゲイン

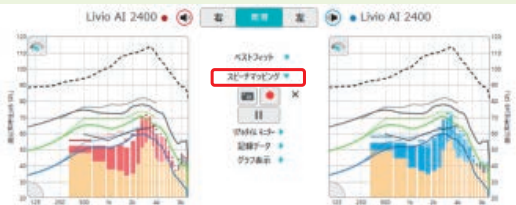


Q2 より細かく調整したい場合は？

- 「ファインチューニング」⇒「ゲインBOX」選択 ⇒ ▼▲調整
- ※ グラフを直接クリック&キーボード ↑ ↓ 操作も可能




Q3 特性波形だけをターゲットゲインに合わせるには？

- 「 3 経験管理」⇒「3:経験豊富」を選択

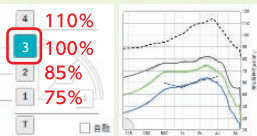

Q4 聴力が変わったかもしれない場合は？

- 「上級ツール」⇒「オーディオメーター」⇒「呈示」確認 ※簡易チェック
- ※ 測定時は補聴器が **ミュート** 状態のため要注意
- 「ターゲット更新」⇒「フィッティング」⇒「 3 クイックフィット」確認
- 「 1 ベストフィット」⇒「現在のメモリーをターゲットマッチ」

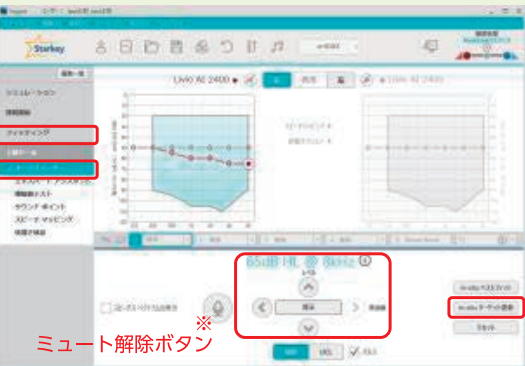

Inspire 画面上の位置





Livio 専用アクセサリ

リモートマイク + (プラス)

2.4GHz

Li-ion



35,000円 + 税

お買い上げ日より 1 年間保証

ストリーミング時間	最大 10 時間（本体充電：3 時間）
通信距離	最大 20 メートル（外部マイク） 最大 10 メートル（Bluetooth）

- 外部マイクストリーミング
- Android 機器での 通話 & 音楽ストリーミング
- Bluetooth 機器のストリーミング（テレビ、カーナビ、音楽プレーヤーetc.）
- テレコイルストリーミング（磁気ループシステム）
- アナログ入力ストリーミング（別売：3.5mm オーディオ入力ケーブル）
- FM 対応ユーロプラグ入力ストリーミング

ボタン 2 つ 同時長押し：7 秒（VC + ボタン & 入力切替ボタン）

ミニマイク

2.4GHz

Li-ion



20,000円 + 税

お買い上げ日より 1 年間保証

ストリーミング時間	最大 10 時間（本体充電：3 時間）
通信距離	最大 20 メートル（補聴器 ↔ 外部マイク）

- 外部マイクストリーミング
- コンパクトサイズ：50mm × 25mm × 20mm

ボタン W ダブルクリック

オールインワン チャージャーケース

Li-ion



16,500円（税込）

お買い上げ日より 1 年間保証

両耳ペアの補聴器を **3 回分充電可能**：3 時間でフル充電
チャージャー本体充電：マイクロUSB（フル充電：3 時間）

- 補聴器置くだけで自動電源 ON / OFF
- 専用乾燥ドライカプセル（2～4 週間）
- お掃除用ブラシ

チャージャー蓄電量		補聴器の充電時間（目安）	
LED 4 つ	75% 以上	充電 15 分	2 時間分
LED 3 つ	75% 以下	充電 30 分	4.3 時間分
LED 2 つ	50% 以下	充電 1 時間	9 時間分
LED 1 つ	25% 以下	充電 2.5 時間	24 時間分
LED 1 点滅	要充電		

◎ 注意：Li-ion 充電アクセサリを長くご使用頂くためにも、3 週間に 1 度はフル充電するようにしてください。
アクセサリの通信距離は、電波を妨害する障害物がない直線距離の場合となります。


注意 Thrive リモコン無し & Thrive アプリも無し でアクセサリを使用する場合

Inspire 調整にて「ユーザーコントロール」→「アクセサリの作動、停止」を「長押し」もしくは、「ダブルタップ（AI のみ設定可）」に設定し、補聴器本体で直接操作ができるようにしておきましょう。

：補聴器とアクセサリのペアリング操作（補聴器の電源 OFF / ON 後、15cm 以内に置いてください。）

Livio 専用リモコン

2.4GHz

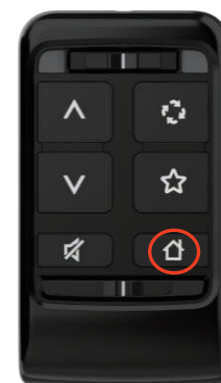

20,000円 + 税

お買い上げ日より 1 年間保証

充電不要（使用期間：3 年）※使用状況によって前後します。

通信距離	最大 20 メートル
------	------------

- ロックスイッチ（電源 ON / OFF）
- 左 / 右 / 両耳 切替えスイッチ
- 音量 UP / DOWN（長押し：アクセサリ VC 操作）
- ミュート
- お気に入り機能（店舗 PC 調整で設定）
- メモリー変更
- ホーム（メモリー 1 の起動時設定に戻るボタン）

ホームボタン長押し：5 秒

TV ストリーマー

2.4GHz



30,000円 + 税

お買い上げ日より 1 年間保証

ストリーミング時間	制限なし（常時コンセント接続）
通信距離	最大 15 メートル

- 光デジタル接続 ※
- アナログ RCA 接続 ※

※ テレビの音声設定が別途必要となります。

Bluetooth ボタン 1 クリック

CROS 送信機

NFMI

RIC R のみ Li-ion

両耳間通信による CROS システム可能
条件：補聴器（受信機）と同スタイル

- CROS / BiCROS 選択可能
- 左右入力バランス調整（BiCROS のみ）



Livio AI RIC R
Livio RIC R



Livio AI RIC 312
Livio RIC 312



Livio AI BTE13
Livio BTE13

100,000円 + 税

お買い上げ日より
1 年間保証

モニターボチャージャー

Li-ion



11,000円（税込）

お買い上げ日より 1 年間保証

両耳ペアの補聴器を **4 回分充電可能**：3 時間でフル充電
チャージャー本体充電：マイクロUSB（フル充電：3 時間）

- 補聴器置くだけで自動電源 ON / OFF
- 急速充電機能 ※（20% 分まで）
- 本体ダブルタップで蓄電量表示
- 専用スリーブケース付
- コンパクトサイズ：70mm × 56mm × 15mm

※ 7 分間で 3.5 時間分（20% 相当）の急速充電 OK