



1

電池の出し入れ・充電方法

あなたの補聴器の
電池タイプは
こちらです
☒ 充電
 
 Aへ

☒ 10A
(PR536)
 
☒ 312
(PR41)
 
 Bへ

☒ 13
(PR48)
 

A 充電式

充電方法

補聴器を充電器
(チャージャーケース)
に設置します。



フェイスプレート(充電端子 ♀ が付いて
いる面)を下に向けて置きます。
自動的に補聴器の電源が切れ、充電が
始まります。

表示ランプの状態


- ・緑色に点滅：充電中
- ・緑色に点灯：フル充電

補聴器を充電ポートから取り外すと、
自動的に電源が入ります。

B

電池交換式


新しい電池のシールをはがす

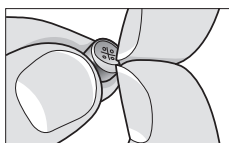


新しい電池から色付きのシール
をはがします。
シールを取り外してから3～5分
待ってから、電池を挿入します。

※電池に湿気がついている場合
には、拭き取ってから入れてく
ださい。


電池の出し入れ方法

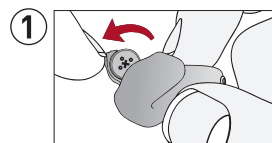



電池ドアの突起(凸)を爪で引っ
掛けてそっと開きます。

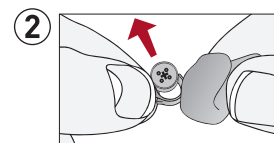

古い電池を取り外します。

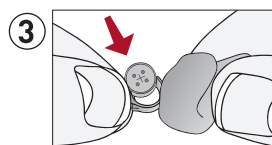

新しい電池のプラス面(シールが貼られ
ていた面)を上にして、電池ドアに仕
かりのせます。

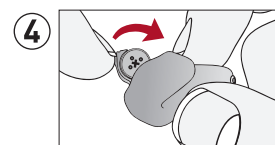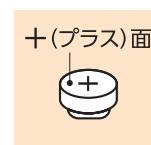

電池ドアを閉じます。

2


耳への着け方

補聴器(左耳/右耳)の確認

青い印字は左耳、
赤い印字は右耳
の補聴器です。

ブラックの場合

「L」は左耳
「R」は右耳
の補聴器です。

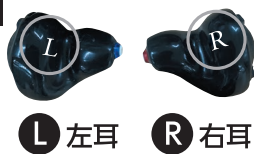


ITC / ITE の場合

①



耳の穴の前に合わせ
て、親指と人差し指
で補聴器をしっかり
持ち、まっすぐ耳の
中に入れてください。

②

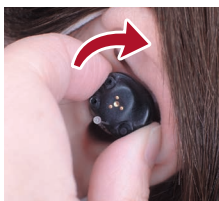

後方に(背中側)に
回しながら外耳道に
そっと入れます。


③



指先で、そっと押し
込みます。

IIC / CIC の場合

①

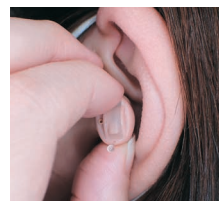

耳の穴の前に合わせ
て、親指と人差し指
で補聴器をしっかり
持ち、まっすぐ耳の
中に入れてください。

②



後方に(背中側)に回
しながら外耳道に
そっと入れます。

③



指先で、そっと押し込
みます。

3

耳からの外し方

ITC / ITE の外し方




□ テグスあり (IIC / CIC)

テグスをつまんで水平(抜けにくい場合、若干後上方)にゆっくり
引き出してください。

□ テグスなし

耳たぶの裏側から親指で図の矢印のように押し上げ、
浮き出た補聴器を指先でつかんで取り出してください。

IIC / CIC の外し方

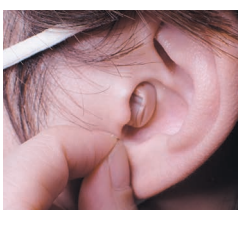

4

充電・保管方法

補聴器を使用していない時、特に就寝時には保管します

充電式

ドライカプセルをチャージャーケース内に
置き、やわらかい布で補聴器を拭いてから
ふたを閉じて保管します。



ドライカプセル

交換目安：約2～3週間
(青・紫 → 薄ピンク・透明に変化)



電池交換式

補聴器の電池は乾燥に弱いので、乾燥ケ
ースに入れるときは、必ず外してください。

電池はふたの上面の電池置きシートに置き
ます。磁石が付いているので、平らな面(+
極)を下にして置いてください。



電池 → ふたの上 補聴器 → 乾燥ケースの中

5

お手入れの仕方

あなたの補聴器で使う
耳垢防止フィルターとマイクカバーはこちらです

※お買い上げの販売店にて定期的な交換をおすすめします。

耳垢防止
フィルターは



- ☒ ホワイトワックスガード
- ☒ フタ式
- ☒ スプリング
- ☒ ワックスキャップ

マイクカバーは

- ☒ 大
- ☒ 小
- (カラー)

音の出口の部分やマイクの清掃

音の出口の部分やマイクに耳垢が少しでもついて
いたら、清掃ブラシを横にしてはらってください。

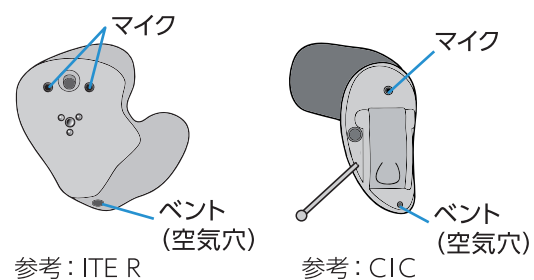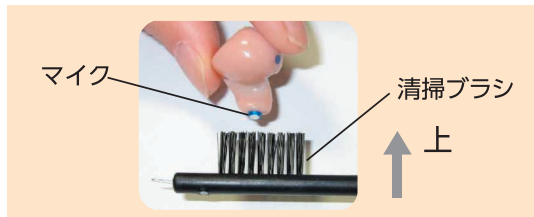

ベント(空気穴)の清掃

ベント(空気穴)が開いている場合には、ブラシを穴にねじり
ながら差し込んで汚れを取り除いてください。



！ 音の出口にブラシを差し込むと補聴器が故障するこ
とがありますのでお止めください。

！ マイクの穴にホコリや汚れが溜まっていると、補聴器
の性能が低下してしまいます。穴に付着しているホコ
リなどは慎重に取り除いてください。

清掃ブラシの部分に汚れが溜まってきたら交換してくだ
さい。清掃ブラシは販売店にてご購入いただけます。お掃除が
難しい場合は、販売店へご相談ください。

ホワイトワックスガードの交換方法

使い捨てのホワイトワックスガードで、補聴器レシーバーへの耳垢の
蓄積を防ぎます。



① 新しいスティックを取り出し、
端を補聴器の使用済みホ
ワイトワックスガードにまっ
すぐ挿入します。

② スティックをまっすぐ引き出
し(ねじらないでください)、
使用済みのホワイトワックス
ガードを取り外します。

③ スティックの反対側
の端を使用して、きれ
いなホワイトワック
スガードを補聴器に
まっすぐしっかりと挿入します。

④ スティックを取り外して廃棄
するために、まっすぐに引き
出します(ねじらないでくだ
さい)。

