



スターキー Inspire 調整ガイド

2022年3月版

Inspireの
起動手順
(事前準備)

Noah4 あり



Noah起動



顧客作成/選択



オーディオ入力



InspireX

Inspire起動

Noah4 なし



PatientBase with Inspire起動「パスワード:123456」



顧客作成/選択



オーディオ入力

① 補聴器の接続検出 (接続 & 読み込み)

調整したい補聴器を用意しましょう。

ワイヤレス = 再起動で検出 (充電30%以上)
非ワイヤレス = ケーブル & フレキ接続

調整スタート

補聴器の読み込み ●
履歴の読み出し ○

開始

② 調整前の初期フィット (各設定確認)

音の調整前に以下の項目を設定しましょう。

音響オプション

耳栓
ベント

経験管理

経験レベル

ベストフィット

フィードバック キャンセラー

データログ

データ初期化

操作設定

③ 自動調整と微調整 (ゲインと最大出力)

実際に音を確認しながら大まかに調整しましょう。

ベストフィット
(自動調整)

ゲイン、最大出力
(1クリック = 2dB)

④ フィードバックキャンセラー確認

お客様に装用してもらい初期化をしましょう。

初期化

初期化状況

危険エリア

安全エリア

⑤ お知らせ音の設定と試聴確認

どんなお知らせ音なのか聞いてもらいましょう。

試聴

「日本語」選択

⑥ 特性測定用の設定 (特性器用)

調整後の状態を特性器で確認しておきましょう。

上級ツール
補聴器テスト

ユーザーゲイン
(すべての抑制オフ状態)

【よくある質問】 Q: 保存方法は? A: 調整内容はリアルタイムで補聴器に自動保存されます。



保存ボタンでPCに履歴保存できます。