

既成タイプ(イヤピース)の選び方

適切な選択でお客様の満足度向上へ

イヤピース							
器種	種類 \ 聴力レベル	軽度	中等度～フラット	中等度	中等度～高度	高度	重度
RIC用	シリコン モールド						—
	中空シリコン モールド				—	—	—
	ヘリックス モールド				—	—	—
RIC・BTE兼用	オープン チップ				—	—	—
	クローズ チップ	—	—			—	—

BTE スマートチューブ用 イヤピース							
器種	種類 \ 聴力レベル	軽度	中等度～フラット	中等度	中等度～高度	高度	重度
BTE用	スマートチューブ シリコン モールド				—	—	—

	シリコンモールド(左右) サイズ(3種類) XS, S, M 各2,200円(税込)		中空シリコンモールド(左右) サイズ(3種類) XS, S, M 各2,200円(税込)		ヘリックスモールド(左右) サイズ(3種類) XS, S, M 各2,200円(税込)
	オープンチップ サイズ(4種類) 5mm, 7mm, 9mm, 11mm 220円(税込)		クローズチップ サイズ(4種類) 5mm, 7mm, 9mm, 11mm 220円(税込)		BTE用 スマートチューブ シリコンモールド(左右) 各2,200円(税込)

イヤモールド レファレンスガイド

耳かけ型補聴器をさらに快適にご利用いただくために
イヤモールドをご検討ください。

新しい「イヤモールド(兼耳かけ型補聴器)注文書」と一緒に本ガイドをご利用ください。



詳細はスターキージャパン販売店様向けプロサイト
「イヤモールド」をご参照ください。
<https://www.starkeyjp.com/pro/products-other-products-earmolds>



カラーバリエーション

7色から選択いただけます

ハード (全7色)

クリア(標準)	レッド	ブルー	ブラック
※ RICはクリアのみ			
パープル	オレンジ	グリーン	

アクリル素材

- 耐久性がある
- 総合支援法の標準タイプ
- シェル修正が簡単

ソフト (全7色)

クリア(標準)	レッド	ブルー	ブラック
※ RICはクリアのみ			
パープル	オレンジ	グリーン	

シリコン素材

- 装着脱着時の痛みを軽減
- 耳道が細い/狭い/曲りが強い場合に有効
- シェル修正が難しい

※ 印刷と実際の色味は多少違う場合があります。あらかじめご了承ください。

RIC



カスタムタイプ(イヤフォーム)の選び方

イヤフォーム						
種類 \ 聴力レベル	軽度	中等度~フラット	中等度	中等度~高度	高度	重度
オープン ヘリックス				—	—	—
CIC				標準タイプ	—	—
スケルトン					ずれにくい もれにくい ムレにくい	—
埋込式 レシーバー						パワータイプ

BTE



カスタムタイプ(イヤフォーム)の選び方

イヤフォーム												
種類 \ 聴力レベル	軽度		中等度~フラット		中等度		中等度~高度		高度		重度	
	標準	細	標準	細	標準	細	標準	細	標準	細	標準	細
チューブ												
CIC								—		—	—	—
スケルトン								—		—	—	—
ITC								—		—		—
ITE								—		—		—



見えにくさ
目立たなさ



ポイント

クリアカラーは
特に目立ちません


開放感
オープンフィッティング

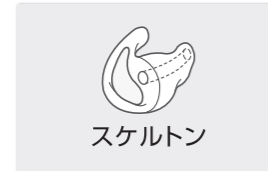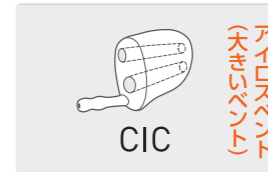

ポイント

既製のオープンチップも
検討できます

入れやすさ
脱着が楽チン

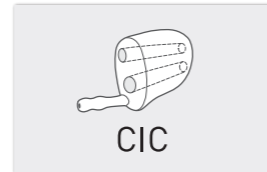

ポイント

試聴時は、既製タイプの
イヤピースも使えます

パワー向き
音漏れしにくい



ポイント

埋込式で
パワーも可能



見えにくさ
目立たなさ



ポイント

ハードのクリアは
特に目立ちません



開放感
オープンフィッティング

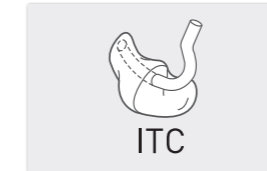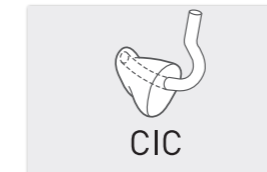

ポイント

ベントを大きく
開ければOK


入れやすさ
脱着が楽チン

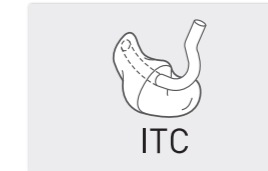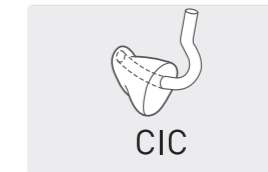

ポイント

カナルの長さを短く
すると入れやすい

パワー向き
音漏れしにくい

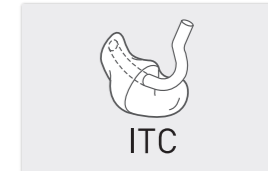

ポイント **CICロック**

CICに
ロックを付けても
ハウリングリスク減少