

# Evolv AI & Livio シリーズ 専用アクセサリー



**☞：補聴器とアクセサリーのペアリング操作（補聴器の電源OFF/ON後、15cm以内に置いてください。）**

## テーブルマイク

2.4GHz  
Li-ion

保証期間  
1年

55,000円（税込）

裏面

操作方法  
ビデオ

|           |                   |
|-----------|-------------------|
| ストリーミング時間 | 最大 12時間（本体充電：2時間） |
| 通信距離      | 最大 15メートル（外部マイク）  |

- 外部マイクストリーミング
  - マイク指向性切替
- |                 |                          |
|-----------------|--------------------------|
| 追従指向性（オートモード）   | 自動で会話などの音声を追いかけます        |
| 固定指向性（マニュアルモード） | 話者がいる方向の表示ランプをタップ（最大2方向） |
| 無指向性（サラウンドモード）  | 表面中央をタップ                 |
- アナログ入力ストリーミング（付属：3.5mmオーディオ入力ケーブル）

**☞ 本体裏面のペアリングボタン長押し：2秒**

## リモートマイク+ プラス

2.4GHz  
Li-ion

保証期間  
1年

38,500円（税込）

操作方法  
ビデオ

|           |                                          |
|-----------|------------------------------------------|
| ストリーミング時間 | 最大 10時間（本体充電：3時間）                        |
| 通信距離      | 最大 20メートル（外部マイク）<br>最大 10メートル（Bluetooth） |

- 外部マイクストリーミング
- Android機器での通話 & 音楽ストリーミング
- Bluetooth機器のストリーミング（テレビ、カーナビ、音楽プレーヤーetc.）
- テレコイルストリーミング（磁気ループシステム）
- アナログ入力ストリーミング（別売：3.5mmオーディオ入力ケーブル）
- FM対応ユーロプラグ入力ストリーミング

**☞ ボタン2つ 同時長押し：7秒（VC + ボタン & 入力切替ボタン）**

## ミニマイク

2.4GHz  
Li-ion

保証期間  
1年

22,000円（税込）

操作方法  
ビデオ

|           |                            |
|-----------|----------------------------|
| ストリーミング時間 | 最大 10時間（本体充電：3時間）          |
| 通信距離      | 最大 20メートル<br>（補聴器 ↔ 外部マイク） |

- 外部マイクストリーミング
- コンパクトサイズ：50mm × 25mm × 20mm

**☞ ボタンWダブルクリック**

## チャージャーケース

Li-ion

保証期間  
1年

バッテリー搭載 16,500円（税込）  
バッテリー非搭載 9,900円（税込）

両耳ペアの補聴器を **3回分充電可能**：3.5時間でフル充電  
チャージャー本体充電：マイクロUSB（フル充電：3時間）

- 補聴器置くだけで自動電源ON/OFF
- 専用乾燥ドライカプセル（2～4週間）
- お掃除用ブラシ

| チャージャー蓄電量 |        | 補聴器の充電時間（目安）※ |           |
|-----------|--------|---------------|-----------|
| LED 4つ    | 75% 以上 | 充電 15分        | 最大 2時間分   |
| LED 3つ    | 75% 以下 | 充電 30分        | 最大 4.5時間分 |
| LED 2つ    | 50% 以下 | 充電 1時間        | 最大 9.4時間分 |
| LED 1つ    | 25% 以下 | 充電 3.5時間      | 最大 24時間分  |
| LED 1点滅   | 要充電    |               |           |

※ RIC R（50ゲインレシーバー）の値

## リモコン

2.4GHz  
使い切り

保証期間  
1年

22,000円（税込）

操作方法  
ビデオ

充電不要（使用期間：3年）※使用状況によって前後します。

|      |           |
|------|-----------|
| 通信距離 | 最大 20メートル |
|------|-----------|

- ロックスイッチ（電源ON/OFF）
- 左 / 右 / 両耳 切替えスイッチ
- 音量UP / DOWN（長押し：アクセサリーVC 操作）
- ミュート
- お気に入り機能（店舗PC調整で設定）
- メモリー変更
- ホーム（メモリー1の起動時設定に戻るボタン）

**☞ ホームボタン長押し：5秒**

## TVストリーマー

2.4GHz

保証期間  
1年

33,000円（税込）

操作方法  
ビデオ

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| ストリーミング時間 | 制限なし（常時コンセント接続） |
| 通信距離      | 最大 15メートル       |

- 光デジタル接続※
- アナログRCA接続※

※テレビの音声設定が別途必要となります。

**☞ Bluetooth ボタン 1クリック**

### 注意

リモコンまたはThriveアプリなしでTVストリーマーを使用する場合

Inspire調整にて「ユーザーコントロール」→「アクセサリーの作動/停止」を「長押し」もしくは、「ダブルタップ（AIのみ設定可）」に設定し、補聴器本体で直接操作ができるようにしておきましょう。

## CROS 送信機

NFMI RIC Rのみ Li-ion

両耳間通信によるCROSシステム可能  
条件：補聴器（受信機）と同スタイル

操作方法  
ビデオ

- CROS / BiCROS選択可能
- 左右入力バランス調整（BiCROSのみ）

|                     |                       |                      |
|---------------------|-----------------------|----------------------|
| Evolv AI RIC R      | Evolv AI RIC 312      | Evolv AI BTE 13      |
| Livio Edge AI RIC R | Livio Edge AI RIC 312 | Livio Edge AI BTE 13 |
| Livio AI RIC R      | Livio AI RIC 312      | Livio AI BTE 13      |
| Livio RIC R         | Livio RIC 312         | Livio BTE 13         |

保証期間  
1年

110,000円（税込）

※ 1000（エコノミークラス）には対応しません。

## ミニターボチャージャー

Li-ion

保証期間  
1年

11,000円（税込）

操作方法  
ビデオ

RIC R・BTE R 用

両耳ペアの補聴器を **4回分充電可能**：3時間でフル充電  
チャージャー本体充電：マイクロUSB（フル充電：3時間）

- 補聴器置くだけで自動電源ON/OFF
- 急速充電機能※（20%分まで）※ 1日1回までの安全設計
- 本体ダブルタップで蓄電量表示
- 専用スリーブケース付
- コンパクトサイズ：70mm × 56mm × 15mm

**7分** 急速充電で **3.5時間**（20%相当）使用可能

保証期間1年  
について

- お買い上げ日より1年目まで自然故障（取扱説明書等の注意書きに従った正常な使用状態での故障）に対する代替品交換を無償で行います。過失による損傷は対象外となります。
- 保証期間外での修理受付は行っておりません。（CROS送信機を除く）

ご注意

- Li-ion充電アクセサリーを長くご使用頂くためにも、3週間に1度はフル充電するようにしてください。
- アクセサリーの通信距離は、電波を妨害する障害物がない直線距離の場合となります。



# スターキー Inspire 調整ガイド

2022年3月版

Inspireの  
起動手順  
(事前準備)

Noah4 あり



Noah起動



顧客作成/選択



オーディオ入力



Inspire起動

Noah4 なし



PatientBase with Inspire起動「パスワード:123456」



顧客作成/選択



オーディオ入力

## ① 補聴器の接続検出 (接続 & 読み込み)

調整したい補聴器を用意しましょう。

ワイヤレス = 再起動で検出 (充電30%以上)  
非ワイヤレス = ケーブル & フレキ接続

調整スタート

補聴器の読み込み ●  
履歴の読み出し ○

開始

## ② 調整前の初期フィット (各設定確認)

音の調整前に以下の項目を設定しましょう。

音響オプション

経験管理

ユーザーコントロール

フィードバック キャンセラー

データログ

耳栓 ベント

経験レベル

操作設定

データ初期化

## ③ 自動調整と微調整 (ゲインと最大出力)

実際に音を確認しながら大まかに調整しましょう。

ベストフィット (自動調整)

ゲイン、最大出力 (1クリック = 2dB)

## ④ フィードバックキャンセラー確認

お客様に装用してもらい初期化をしましょう。

初期化

危険エリア

安全エリア

## ⑤ お知らせ音の設定と試聴確認

どんなお知らせ音なのか聞いてもらいましょう。

調整

試聴

「日本語」選択

## ⑥ 特性測定用の設定 (特性器用)

調整後の状態を特性器で確認しておきましょう。

上級ツール 補聴器テスト

ユーザーゲイン (すべての抑制オフ状態)

【よくある質問】 Q：保存方法は？ A：調整内容はリアルタイムで補聴器に自動保存されます。



保存ボタンでPCに履歴保存できます。