

# レファレンスガイド

## (カスタムとストック)

次のチャートはユーザーのオーディオグラムに基づいて、標準イヤモデル、スマートイヤチューブ+イヤモデル、またはスマートイヤチューブ+イヤチップ等を選択する為のレファレンスガイドです。

		聴力レベル					
		軽度	中等度～フラット	中等度	中等度～高度	高度	重度
(カスタム) イヤモデル	CIC	●	●	●	●	●	
	カナル	●	●	●	●	●	●
	セミカナル	●	●	●	●	●	●
	フルシェル	●	●	●	●	●	●
	スケルトン	●	●	●	●	●	●
	中空CIC	●	●	●			
スマートイヤチューブ+イヤチップ or イヤモデル (ストック)	コンフォートイヤチップ (オープン)	●	●	●			
	コンフォートイヤチップ (クローズ)			●	●		
	スリムチューブ ストックイヤモデル	●	●	●			

● イヤモデル

● スマートイヤチューブ+イヤモデル

● 両方可

# BTE フィッティングソリューション

## (カスタムとストック)

BTEのフィッティングを成功させるためには、最適なインターフェースを選択する必要があります。

まずBTEは、イヤフック(標準チューブ)かスマートイヤチューブにするかを選択します。その後、モールド部分をカスタムタイプかストックタイプにするのか、一人ひとりの状態に合わせて選択してください。

### 〈カスタムタイプ〉 イヤモールドスタイル

※標準チューブ

材質:

ハード

ソフト (ハイストレングスシリコン)

カラー:

ハードタイプ基本カラー = クリア

ソフトタイプ基本カラー = クリア\*

\*バラエティに富んだ追加カラーもあります



CIC



CICロック



カナル



セミカナル



フルシェル



スケルトン

### 〈ストックタイプ〉(既製) スマートイヤチューブスタイル



コンフォートイヤチップ (オープン)  
5mm, 7mm, 9mm, 11mm,



コンフォートイヤチップ (クローズ)  
5mm, 7mm, 9mm, 11mm,



スマートイヤチューブ  
シリコンイヤモールド

### 〈カスタムタイプ〉 スマートイヤチューブスタイル

※細チューブ

材質:

ハード

ソフト (ハイストレングスシリコン)

カラー:

ハードタイプ基本カラー = クリア

ソフトタイプ基本カラー = クリア\*

\*バラエティに富んだ追加カラーもあります



中空CIC



CIC



CICロック



カナル



セミカナル



フルシェル



スケルトン

## ご注文方法

カスタムタイプのご注文はイヤモールドオーダーフォームをご利用下さい。