

スターキー

エボルブ エーアイ
Evolv AI クラス別設定 ミニガイド

evolv AI
(★進化ポイント)

周波数特性

✓ **ファイン チューニング**

2400					2000					1600					1200					1000																	
+ 低		+ 中		+ 高		+ 超域		+ 低		+ 中		+ 高		+ 超域		+ 低		+ 中		+ 高		+ 超域															
150-500	750-1.1K	1.4K-2K	2.3K-3K	3.3K-3.9K	4.2K-5.2K	5.6K-6.9K	7.5K-9.4K	150-500	750-1.1K	1.4K-2K	2.3K-3K	3.3K-3.9K	4.2K-5.2K	5.6K-6.9K	7.5K-9.4K	150-500	750-1.1K	1.4K-2K	2.3K-3K	3.3K-3.9K	4.2K-5.2K	5.6K-6.9K	7.5K-9.4K	150-500	750-1.1K	1.4K-2K	2.3K-3K	3.3K-3.9K	4.2K-5.2K	5.6K-6.9K	7.5K-9.4K						
14	27	34	38	39	28	22	-11	14	27	34	38	39	28	22	-11	14	27	34	38	39	28	22	-11	14	27	34	38	39	28	22	-11						
28	40	46	48	49	40	33	-6	28	40	46	48	49	40	33	-6	28	40	46	48	49	40	33	-6	28	40	46	48	49	40	33	-6						
40	46	46	46	40	40	33	-6	40	46	46	48	49	40	33	-6	40	46	46	48	49	40	33	-6	40	46	46	48	49	40	33	-6						
96	110	118	122	122	115	106	82	96	110	118	122	122	115	109	106	104	102	96	110	118	122	122	115	109	106	104	102	96	110	118	122	122	115	109	106	104	102

★ボイス強調 シンクロ On

★ボイス強調 静寂 4 **オール**

衝撃音 4 **4 or 3**

風切音 4 **2**

機械音 4 **2**

BGM強調 4 **2**

会話強調 & 環境管理 (BGM強調)

✓ **サウンドマネージャー**

★ボイス強調 シンクロ On

★ボイス強調 静寂 4 **オール**

衝撃音 4 **2**

風切音 4 **2**

機械音 4 **2**

BGM強調 4 **2**

★ボイス強調 シンクロ Off

★ボイス強調 静寂 1 **他オール**

衝撃音 1 **1**

風切音 1 **1**

機械音 1 **1**

BGM強調 Off

指向性

✓ **サウンドマネージャー**

アダプティブ **追従**

ダイナミック **非追従**

Edgeモード (+)

✓ **ユーザーコントロール**

短押し・ダブルタップ **有効**

アプリ操作 OK

短押し・ダブルタップ **無効**

★アプリ操作 OK

短押し・ダブルタップ **無効**

アプリ操作 NG (非対応)

スターキー

インスパイア 試聴 ミニガイド

Inspire 起動調整開始準備

2021.0.10164.0

Noahあり ▶ ▶ **顧客選択** ▶ **オーディオ入力** ▶ **Inspire起動** ▶ **InspireX**

Noahなし ▶ **Inspire起動** ▶ パスワード: 123456 ▶ **顧客選択** ▶ **オーディオ入力**

補聴器 ▶ **開始**

試聴フィッティングの手順

- 音響オプション**
※ 耳栓・ベントの種類選択します。
- ベストフィット**
※ 聴力に合わせて自動調整します。
- クイックフィット/ファインチューニング**
※ 音量・音質を微調整します。
- ユーザーコントロール**
※ ボタン操作を設定します。
- サウンドマネージャー**
※ 機能の確認とクラス別の設定をします。
- お知らせ音**
※ 電池切れの合図確認をします。
- 保存**
※ 調整内容をパソコン内に保存します。

MISC0078-00-JJ-JP JPYMI-078