

# 転倒検出通知

システムの設定 : Apple iOS

## 補聴器を装用される方側の設定

補聴器に自動通知または手動通知、あるいはその両方が有効になっていることを補聴器販売店にご確認ください。転倒検出通知システムを起動させるには、Thrive (スライブ) ヒアリング・コントロールアプリ内で追加の設定を行う必要があります。


1 Thriveヒアリング・コントロールアプリをインストールします。詳細については、「Thriveヒアリング・コントロールアプリのセットアップ: Apple iOS」を参照してください。転倒通知機能は、アドバンスモードでのみ使用可能です。

2 クラウドサービスにサインインしていることをご確認ください。転倒通知機能を使うにはクラウドへのサインインが必要です。

3 ナビゲーションメニュー > 転倒通知の順に選択して設定を開始します。

4 補聴器販売店で転倒検出通知が有効に設定されている場合は、自動通知または手動通知、あるいはその両方にチェックマークが入っています。[ 転倒通知の設定開始 ] をタップします。

5 転倒通知のお知らせ音を聴試します。ボタンをタップするとお知らせ音が聞こえます。どのようなお知らせ音が覚えておくと、もしもの場合安心して対処することができます。

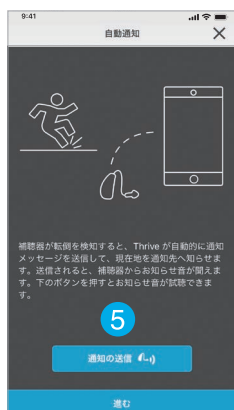

自動通知が  
送信された時



手動通知が  
送信された時



通知が  
受信された時



通知を  
キャンセルした時



通信障害

## 補聴器を装用される方側の設定 (続き)

- 6 あなたの個人データを入力します。すでに Thrive アプリ、またはご使用の Apple iOS 端末のヘルスケアデータに個人データを入力されているのであれば再入力される必要はありません。
- 7 連絡したい相手先への通知メッセージに表示させたい名前を入力します。通知メッセージのサンプルが画面に表示されます。
- 8 通知メッセージを受け取る相手のお名前とスマートフォンの電話番号を入力します (最大3名まで)。相手が通知先として転倒通知システムに参加されるには、72時間以内に参加の登録が必要になります。少なくとも1名が通知先として参加が確認されるまで、通知先に「保留中」と表示され、転倒通知システムは作動されません。



## 転倒検出の通知先としてメッセージを受信される方側の設定

補聴器を使用される方が連絡したい相手として、それぞれの連絡先へ転倒検出通知システムへの参加を求めるメッセージを送信します。通知先1名につき、複数の補聴器装用者の通知先として参加登録することはできません。



## 通知先が参加登録を止めるには

転倒検出の通知先を止めたい場合、通知先の参加登録を確認するために受信したメッセージ内のリンク先をタップする、または [www.starkey.com/contact-starkey-hearing](http://www.starkey.com/contact-starkey-hearing) から停止手続きを行います。



1

スマートフォンの電話番号を入力後、送信するとショートメッセージで確認コードが届きます。



2

確認(暗証)コードを入力します。



3

自分の名前に対応する「削除」ボタンを選択します。



4

通知先がシステムへの参加を止めたことが補聴器装用者に知らされます。

## 転倒通知システムの状態

システムを作動させるには、少なくとも1人の通知先から参加の確認が必要です。転倒通知画面の見出し部分が赤色から緑色に変わり、「システム作動中」と表示されます。

それぞれの通知先の参加登録が確認されると、お名前の欄から「保留中」の表示が消えます。

転倒通知機能が作動されると、転倒の自動検出と、手動による転倒通知の送信が可能になります。



システムが  
作動していない状態



システムが  
作動している状態

## その他

**転倒通知は緊急サービスの代わるものではなく、緊急サービスに通報するものではありません。**

転倒検出通知は、補聴器装用者が知らせたいと思う身近な人に特定の情報を伝達する簡単なツールです。Thriveアプリが救急サービスと通信するものではなく、何らかの形で救急サービスを提供するものでもありません。また、専門の救急サービスの代替になるものでもありません。Thriveアプリの転倒検知機能の動作は補聴器装用者と、補聴器装用者が指定した連絡先との双方のワイヤレス接続に依存します。Bluetooth® または携帯電話の接続が失われたり、中断されたりすると、この機能は通知メッセージを正常に配信できません。

通信経路の接続性は、以下のようないくつかの場合において失われる可能性があります：

ペアリングされたモバイル機器が補聴器との通信範囲外にあるか、または補聴器との接続性が失われた場合。

補聴器または携帯電話の電源が入っていない、または十分な電力が供給されていない場合。

モバイル機器が機内モードである場合。

モバイル機器が誤作動した場合。

悪天候がモバイル機器のネットワーク接続を妨げる場合など。

**転倒通知機能は一般ヘルスケア機器の機能です。  
(医療機器に該当する機能ではありません)**

転倒通知機能は、一般ヘルスケア機器の機能として設計、利用されます。転倒通知機能は、特定の病気や特定の病状の診断、処置、治療、予防を目的にしたものではなく、特定の集団を対象としていません。転倒通知機能は、補聴器装用者の一般的な健康をサポートするために、補聴器装用者が転倒した可能性があることを検知し、そのような事態に応答して迅速に通知メッセージを送信するためだけに設計されています。

詳しい情報は、補聴器に付属されている取扱説明書や、Thriveアプリ内のThriveエンドユーザー使用許諾契約書に記載されており、補聴器装用者はThriveアプリを使用する前に読んで同意する必要があります。