


ユーザーコントロール

Inspire を立ち上げて、補聴器を接続します。この接続開始手順については Livio AI/Livio 補聴器各種の「初回フィッティング手順 (QuickTIPs)」を参照してください。最初のフィッティングの際にはユーザーコントロールの設定デモが表示されます。「**デモを見る**」を選択してユーザーコントロールの設定に関するデモを表示させるか、「**再表示しない**」を選択したのちに「**閉じる**」でウィンドウを閉じます。左側のナビゲーションバーを選択して、これ以降のプログラミングにおけるユーザーコントロールの調節を行ってください。

ユーザーコントロール設定

有効にしたいユーザーコントロールを左から選んで、右にある枠の中に「ドラッグ&ドロップ」します。左クリックから左側の青いボタンをドラッグ (マウスの左クリックで捕み) して右側の該当箇所にドロップ (指を離す) します。

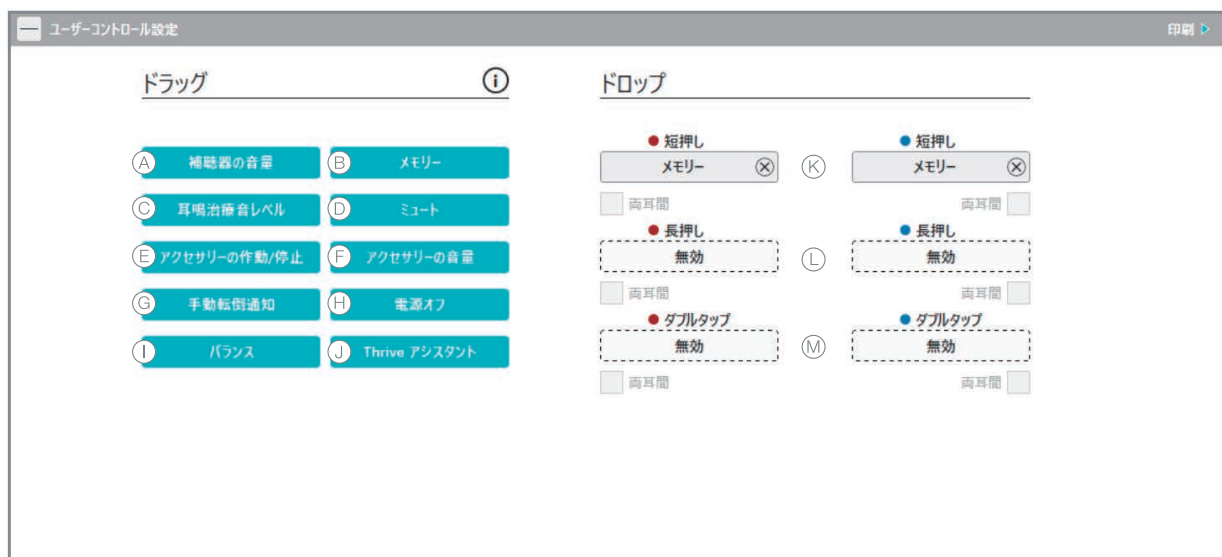

ユーザーコントロールの選択肢:

- | | | |
|------------|----------------------------|---|
| Ⓐ 補聴器の音量 | Ⓔ アクセサリーの作動/停止 | Ⓕ 電源オフ (充電式補聴器のみ) |
| Ⓑ メモリー | Ⓖ アクセサリーの音量 | Ⓖ バランス
(CROS補聴システムのBICROSのみ) |
| Ⓒ 耳鳴治療音レベル | Ⓖ 手動転倒通知 (Livio AI 2400のみ) | Ⓖ Thriveアシスタント
(Livio AI 2400 及び Livio 2400のみ) |
| Ⓓ ミュート | | |

ユーザーコントロール機能の操作方法:

- Ⓚ **短押し**: 補聴器の音量、メモリー、耳鳴治療音レベル、アクセサリーの音量
- Ⓛ **長押し**: 補聴器の音量、メモリー、耳鳴治療音レベル、ミュート、アクセサリーの作動/停止、アクセサリーの音量、電源オフ、手動転倒通知
- Ⓜ **ダブルタップ**: アクセサリーの作動/停止、Thriveアシスタント

注: ダブルタップは Livio AI でのみ有効

注: 耳鳴治療音レベルがユーザーコントロールでは有効に設定され、耳鳴治療音が無効になっている場合は画面に警告アイコンが表示されます。詳細な情報は「耳鳴治療音 (QuickTIPs)」を参照してください。




VC範囲とステップサイズ

音量調節が有効な場合、VC範囲とステップサイズが選択できます。

① VCマークにカーソルを置き動かしてVC範囲を調節します。

② ステップサイズを2dBと4dBから選択します。

注: Inspire では、ユーザーコントロール設定で音量調節が有効になっていない時には音量調節範囲とステップサイズの調整はできません。

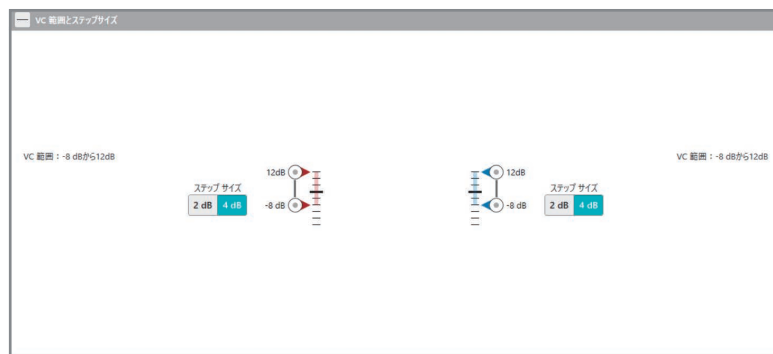


耳鳴治療音の出力範囲とステップサイズ

耳鳴治療音が有効になっている場合は、耳鳴治療音の出力範囲とステップサイズが選択できます。詳細な情報は「耳鳴治療音 (QuickTIPs)」を参照してください。

③ VCマークにカーソルを置き動かして出力範囲を調節します。

④ ステップサイズを2dBと4dBから選択します。

注: Inspireは、ユーザーコントロールの設定で耳鳴治療音が有効にされていない場合は耳鳴治療音の出力範囲とステップサイズを調節できません。

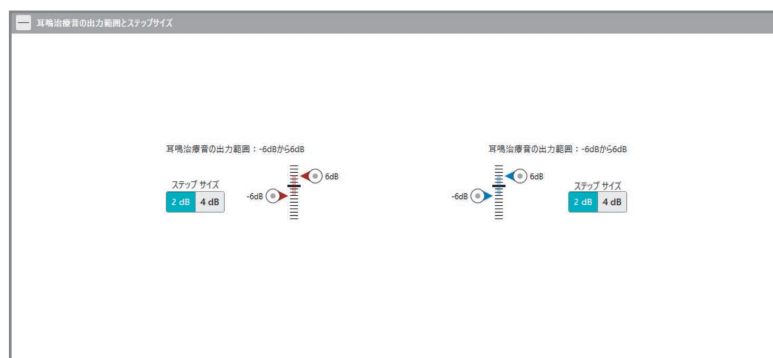

その他の設定オプション

メモリーを切り替えると、出力レベルがリセットされるように設定できます。この機能を有効にすると、メモリーを切り替えるたびに補聴器の音量と耳鳴治療音レベルはプリセットされたレベルに戻ります。



デバイスガイド

メニューバーから「印刷」を選択してデバイスガイドを印刷します。デバイスガイドには、接続された補聴器に設定されたユーザーコントロールの情報が記載されます。

