

# Thriveリモコン

(スライブ)




## ペアリング

Thriveリモコンを Livio AI や Livio 補聴器と一緒に使うためにはペアリングが必要です。ペアリングを一度行くと、それ以降は自動的に補聴器とThriveリモコンがお互いを認識します。ThriveリモコンのペアリングはInspire上でも、またInspireを使用しなくても実行可能です。Livio AIとLivio補聴器は、Thriveリモコンと直接ペアリングすることもできます。

### Inspire 上でのペアリング


- 1 Inspireを立ち上げ、補聴器を接続します。
- 2 左のナビゲーションバーから「アクセアリー」を選択します。
- 3 Thriveリモコンのロックスイッチが「解除(左)」になっていることを確認します。
- 4 Thriveリモコンから30cm以内の位置に置きます。
- 5 ホームボタンを5秒間押し続けて Thriveリモコンをペアリングモードにします。両方の表示ランプが速く点滅します。
- 6 「ペアリング」を選択し、補聴器をペアリングモードにします。(A)
- 7 アクセサリー画面にThriveリモコンが表示されれば、ペアリング成功です。(B)
- 8 Thriveリモコン画像の下にあるドロップダウンメニューからお気に入りボタンの設定を行います。(C)
- 9 ペアリング手順については、必要に応じて情報アイコン①を参照してください。(D)

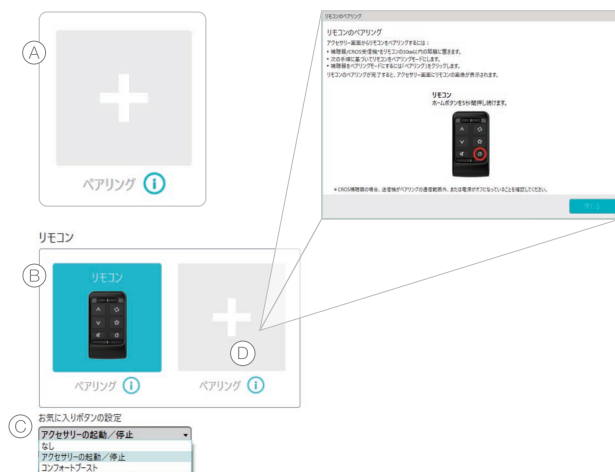

## ペアリング (続き)

### 補聴器と直接ペアリング

- 1 過去に補聴器とペアリングを行ったすべての携帯端末その他のアクセサリーの電源を切ります。
- 2 Thriveリモコンのロックスイッチが「解除 (左)」になっていることを確認します。
- 3 補聴器の電源を一旦切って、再び入れ直します。
- 4 補聴器を Thrive リモコンから 30cm 以内の位置に置きます。
- 5 Thrive リモコンのホームボタンを5秒間押します。両方の表示ランプが速く点滅します。
- 6 左側の表示ランプが青色に2秒間点灯し、右側の表示ランプが赤色に2秒間点灯したら、ペアリングは成功です。Thrive リモコンは補聴器が片耳か両耳かを自動的に認識し、1 台または 2 台の補聴器に対してペアリングされます。

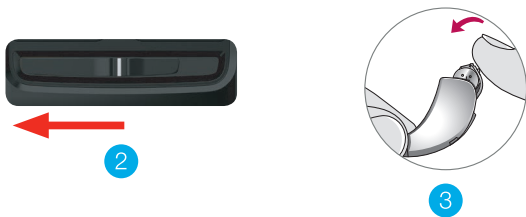

## 使用方法

- 耳側選択スイッチ**：両耳装用時は中央です。個別の調整では左右にスライドさせます。
  - 音量調節**：矢印の短押しは補聴器の音量の増減、長押しはアクセサリーからのストリーミングの音量の増減を行います。ストリーミング音量の調節はTV ストリーマー、リモートマイク+、ミニマイクからのストリーミングに対してのみ有効で、iOS 端末からのストリーミングは影響ありません。
  - ミュート**：補聴器からの音を一時的に消すときに押します。もう一度押すと音がきこえます。
  - メモリー**：Inspire でプログラムされたすべてのメモリーを順番に切り替えて選択できます。
  - ホーム**：補聴器の音量とメモリー設定を電源を入れた時の状態に戻します。
  - ロック解除**：外部からの調整が可能になります。ロックすると誤作動を防止し、電池を節約できます。
  - お気に入りボタン**：お気に入りボタンの設定を可能にします。設定は Inspire 上で行い、以下の内容を選択できます。
    - 設定なし**：  
お気に入りボタンを押しても反応しません。
    - ストリーミングの開始/停止**：  
ボタンを押すことでアクセサリーからのストリーミングを開始 (または停止) します。
    - コンフォートブースト**：  
騒音環境下で音質を最適化しながらノイズを抑制します。もう一度押すとこの機能を停止します。
    - メモリー4にジャンプ**：  
補聴器のメモリー4の設定に変更されます。
    - 耳鳴治療音ON/OFF**：  
補聴器に設定されている耳鳴治療音を再生/停止します。\*
- \*耳鼻科医師の診断を受け、補聴器に耳鳴治療音が有効に設定されている場合のみ、使用できます。