


## インストールの前に

Inspire<sup>®</sup>(インスパイア)のインストールと正常な動作のために、お使いのコンピュータに次のものがあることを確認してください。

- **プロセッサ速度:** Pentium 4 以上推奨
- **システム RAM:** 3 GB 推奨(最低限2 GB)
- **OS:** Windows 7、Windows 8 or 8.1\*、Windows 10
- **通信ポートと調整用プログラマー:**
  - HiPro & シリアルCOMポート (+USB 変換アダプタ)
  - SpeedPort 2、NOAHlink、HiPRO USB、TruLink ワイヤレスプログラマー、NOAHlinkワイヤレスプログラマー & USBポート
- **オーディオハードウェア:** 音源ファイルの再生にサウンドカードとステレオスピーカーが必要
- **顧客データベース:** NOAH System 4(または3)、Patient-Base、ProHear

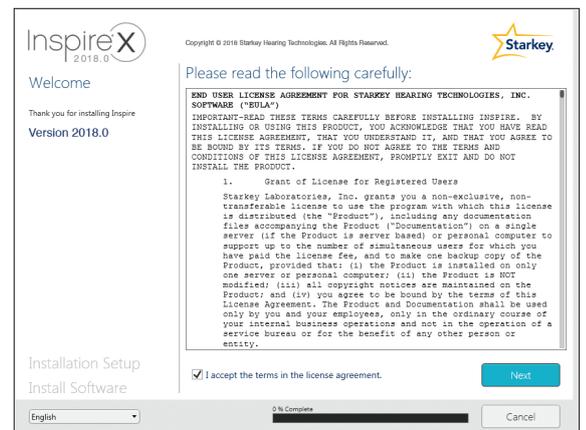

## インストール手順

Inspireは、対応する顧客データベースに直接インストールをします。  
(データベース内からのインストールではない)

CD/DVD-ROM、USBスティック、Inspire Updaterなどからインストールできます。

インストール中にPCの再起動を要求された場合は、再起動後に「完了」画面が表示されるまでは、画面に表示される指示に従って続行してください。インストールを開始するには、USBスティックをUSBポートに挿入するか、InspireディスクをCD/DVD-ROMドライブに挿入します。インストールが自動的に開始されない場合は、デバイスの内容を参照し、セットアップexeファイルをダブルクリックします。