

A・M・P™

アンプ
A・M・P デジタル



アンプ

“A・M・P デジタル”は、スターキーの技術力が実現した新ジャンルのエントリー補聴器です。ユーザーに適したサイズのスリーブで超小型の本体を包み、耳にそっと押しこむだけ。専用に開発したソフトウェアで、ユーザーごとの調整も簡単です。

<4パターンのプリセット調整>

プリセットされた4種類の調整(うちひとつは最大音響利得)から、ユーザーの聴力に合ったものを選ぶだけで、基本的な調整は完了します。

<4項目の個別調整>

ゲイン、低周波数、高周波数、出力の個別調整項目を設定。こもり感やひびき感の軽減にも柔軟に対応し、設定は電池を抜いても保存されます。

<4サイズのスリーブ設定>

しなやかで丈夫なエラストマー素材を採用した、4サイズのスリーブをご用意。快適な装用感を実現しつつ、電池カバーやワックスガードの機能までも兼ね備えています。

<マグネットツール>

専用のマグネットツールで、本体を耳にいったまま電源のオン／オフ、およびボリュームの調整が可能です。電池の着脱に便利な電池クリップとのセットで携帯にも便利です。

<アダプティブ フィードバック キャンセル>

独自の製品構造に最適化された、オリジナルのハウリングキャンセレーションを搭載。クラスをこえた“ピーピーしない補聴器®”です。

<お知らせ音>

電源オン／オフ、ボリューム調整など、ユニークな音でお知らせします。

<A・M・P デジタル専用の調整ソフトウェアをご用意>


機能を絞り込み、DTMF(タッチトーン)信号を利用した専用のソフトウェアを新開発。パソコンのほか、iPadやiPhone、iPod Touchを利用した直感的な操作で調整が可能です。

アンプ A・M・Pデジタル 製品仕様

		JIS	ANSI
適応聴力範囲		軽度～中等度	
適応聴力レベル (dB HL)		55	
90dB最大出力音圧 レベル (dB SPL)	ピーク	114	100
	1600Hz	102	-
最大音響利得 (dB)	ピーク	35	25
	1600Hz	29	-
等価入力雑音レベル (dB SPL)		<35	
使用電池		PR536(10A)	
電池の電流 (mA)		0.93	
電池寿命 (時間)		80	

- このデータはJIS C 5512(2000)、ANSI S 3.22(2003)に基づいて測定されています。
- 実際の電池寿命は使用状態によって変化します。
- 改良のため、仕様は予告なく変更される場合があります。

適応聴力範囲

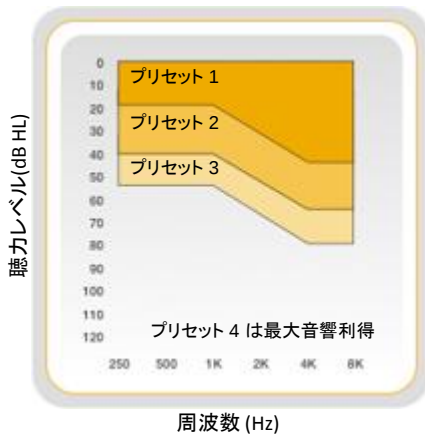

マグネットツールと 電池クリップ



機能早見表

チャンネル数	4
プリセット調整	3種類 + FOG
個別調整	4項目
ボリューム調整	5段階 ±4dBステップ
スリーブサイズ	オープンタイプ3種 (S/M/L) 及び耳栓タイプ
お知らせ音	トーン
ハウリング抑制機能	アダプティブ フィードバック キャンセル

補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。
しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。

iPhone 調整画面の例



特性表

90dB最大出力音圧レベル: OSPL90
最大音響利得: FOG50 ※2 cm³ カプラ測定

