


様々な環境下でのきこえに快適さと明瞭性のバランスを取るために、ユーザーご自身が微調整できる機能を搭載しました。

アドバンスモードでは、さまざまな環境に合わせて、以下の6種類の項目からお好みの聞こえに調整できます。

この機能を利用するには、ホーム画面の  をタップして、きこえのカスタマイズを選択してください。

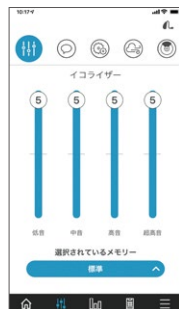

イコライザー

お好みの音質に、イコライザーで微調整します。



ボイス強調

騒々しい場所でも会話への理解が高まります。



機械音

機械的な大きな雑音がある場所で、聞き取りの快適性が増します。



風切り音

風の強い場所でも、聞き取りの快適性が増します。



マイクの指向性

補聴器マイクロホンの音の拾い方を調整します。以下の名称の各アイコンをタップします。

前方

前方からの音だけを拾います。

全方向

すべての方向からの音を拾います。

自動切替

環境に応じて、自動的に**前方**と**全方向**を切り替えます。

自動適応

音声を自動的に追いかけて、雑音源は拾わない指向性パターンに変化します。



サウンドスペース®

画面上で点滅している○アイコンを動かして、リアルタイムに聞こえてくるお好みの音質に合わせて変更できます。お好みの音質になったら画面上方の左角にある「閉じる」を選択して画面を閉じます。