



アクセサリ

アドバンス

Evolv AI / Livio AI / Livio 共通

Thriveアプリ内に補聴器とペアリングされたアクセサリが表示され、アクセサリからのストリーミングの開始や停止、音量調節の操作ができます。

- 1 ホーム画面の  をタップしてアクセサリを選択してください。
- 2 補聴器とペアリングされているアクセサリが表示されます。

操作したいアクセサリを選択したら：

- ・ ストリーミングを開始/停止
- ・ アクセサリボタン近くの  マークをタップして、アクセサリ名を編集
- ・ ストリーミング音量の調節
- ・ ペアリングしているアクセサリを削除
- ・ 補聴器のマイク音量の調節



をタップして **Voice AI (ボイス AI)** にアクセスすると、人工知能 (AI) による音声強調機能が利用できます。スマートフォンのマイクを遠隔マイクのようにご利用いただけます。

Voice AIの利用条件は次の通りです。

- ・ Evolv AI 2400 または Livio Edge AI の両耳装用
- ・ iOS端末の利用
- ・ 250-500Hz で 50dBHL 以上の聴力レベル

三 設定メニュー



操作ガイド

アドバンス

ベーシック

Evolv AI / Livio AI / Livio 共通

Thriveアプリの各画面/機能について項目ごとに説明しています。各項目をタップすると、詳しい情報を見ることができます。