

Thriveアプリは、2つのモード「アドバンスモード(標準)」または「ベーシックモード」をお選びいただけます。
設定メニュー > アプリの設定 > アドバンスモード から変更できます。(ベーシックモードは操作項目を限定します。)

🏠 ホーム

補聴器の音量調節、消音の操作が簡単にできます。メモリー名をタップして、メモリー名の編集やジオタグの割り当てができます。

メモリーメニュー アドバンス ベーシック Evolv AI / Livio AI / Livio 共通

補聴器のメモリー：補聴器販売店でパソコン調整で補聴器に設定されたメモリーが表示されます。

カスタムメモリー：ユーザーご自身がお好みに合わせて作成したメモリーです。新規にメモリー作成する場合、現在の聞き取り環境で一番良い音質を与えてくれるメモリーを選択して、カスタマイズするメモリーの基礎にできます。

新規メモリーを カスタマイズする手順：

※ 基となるメモリーを選択した状態にします。

- 1 メモリーメニューをタップします
- 2 メモリー名の編集をタップします
- 3 メモリー名を入力します
- 4 位置情報の設定をタップします
- 5 ジオタグ(位置情報)の設定：

カスタムメモリーと現在地を関連付けます。
地図の下方にある📍マークをタップすると、
現在地がメモリーに位置付けされます。



仮メモリー：補聴器販売店で設定されたメモリーに少しでも調整を加えると自動的に「仮メモリー」として保存されます。📍マークをタップするとメモリー名を編集することができ、継続して使用できるようにカスタムメモリー内に保存します。

スマートVC：基礎になるメモリーの音量位置が保存され、作成されたカスタムメモリーにも同じ音量が設定されます。