



補聴器の設定

アドバンス

ベーシック

Evolv AI / Livio AI / Livio 共通



ご使用の補聴器について:

接続している補聴器の製品名、製造番号、ファームウェアのバージョンが表示されます。補聴器の接続が切れる则表示は消えます。



タップコントロール (Evolv AI / Livio AI シリーズ対応):

タップコントロールのオンとオフが設定できます。ダブルタップ (2回軽く補聴器をたたくこと) で、アクセサリからのストリーミングの開始/停止、Thriveアシスタントやエッジモードの起動/停止を行うことができます。左右で別々の機能を設定することもできます。タップ感度は「初期設定」以外に「弱く」と「強く」から選べます。



乗り物:

自動で切り替わる乗り物専用メモリーのオンとオフができます。オンにすると、スマートフォンに搭載されているセンサーが起動し、走行速度が時速16kmを超えると乗り物メモリーに自動的に切り替わります。📍マークをタップすると、走行時に切り替わるメモリーをお好みのメモリーに選択できます。



データログ:

データログのオンとオフを行います。データログをオフにすると補聴器に使用時間や消費電量などのデータが記憶されません。



自動ストリーミング (スマホ):

自動ストリーミングのオンとオフができます。初期設定では自動ストリーミングがオンに設定され、Stream Boost (ストリームブースト) がメモリーに使用されます。自動ストリーミングがオフの場合は、ストリーミングが開始されてもメモリーは変更されません。

電話: 電話が掛かってきたときに自動的に切り替わるメモリーを選択します。

メディア: スマートフォンから音楽や音声ストリーミングされる際に自動的に切り替わるメモリーを選択します。

 **電話の受話/終話/拒否 (Evolv AI 対応)** : ios15.1以降のiPhone11以降のiPhone/iPad端末と通信して、ハンズフリー通話が可能です。iPhone/iPad端末に電話が掛かってきたら、補聴器の操作ボタンを**短押し**して電話に出ます。電話を切るまたは拒否する時は操作ボタンを**長押し**します。

 **Thriveアシスタントマイク (Evolv AI 2400, 2000, 1600 / Livio Edge AI, AI 2000, AI 1600 対応)** :

音声で操作する機能(ボイスコマンド)を使用する場合は、「電話のマイク」、「補聴器のマイク」に選択できます。

 **マスクモード (Evolv AI / Livio AI / Livioシリーズ 2400, 2000, 1600, 1200 / Livio Edge AI 対応)** :

マスク越しの会話を聴き取りやすく専用のプログラムをカスタムメモリーとして追加できます。

機能を追加する場合は、オンに切り替えてください。マスクモードを使用したい時は、ホーム画面で「選択されたメモリー」をタップ、カスタムメモリー内の「マスク」を選択します。

 **自動スリープ (Evolv AI / Livio AI シリーズ 対応)** :

補聴器が使用されていない間、自動的に休止モード(スリープ状態)になるように補聴器を設定できます。

機能を使う場合は、オンに切り替えてください。

 **コンフォートブースト (Evolv AI 1200, 1000 / Livio Edge AI 以外の Livio AI / Livio シリーズのみ対応)** :

初期設定ではオフになっています。オンにすると、ホーム画面にコンフォートブーストのアイコン()が表示されます。アイコンをタップすると青色に変わり、コンフォートブーストが有効になります。コンフォートブーストは手動でオフにしない限り機能し続けます。騒々しい環境でのきこえに快適性が増します。