

## 転倒通知

アドバンス

ベーシック

(Evolv AI / Livio Edge AI 対応)

補聴器に内蔵された2種類のセンサーで、補聴器ユーザーの転倒を検知して、登録された連絡先へ、自動的に通知します。

- **自動通知**：転倒を検知すると自動的に通知を送信。
- **手動通知**：ユーザー自身で操作ボタンを押して、通知を送信。

通知先の設定：

予め登録した最大3つの携帯電話の連絡先にSMS(ショートメール)送信できます。

※ 手動通知は予め補聴器販売店で  
補聴器の操作ボタンを設定する必要があります。



## 補聴器ユーザー側の設定

- 1 設定メニュー > 転倒通知の順にタップ
- 2 クラウドサービスにサインインします (サインイン済の場合は非表示)。
- 3 手動通知は、補聴器の設定が必要です。利用する場合は、補聴器販売店にご相談ください。
- 4 通知したい相手先の通知メッセージに表示する名前を入力します。  
通知メッセージのサンプルが画面に表示されます。
- 5 通知相手の名前と携帯電話の番号を入力します (最大3つまで)。通知相手が転倒通知システムに参加するには、72時間以内に参加登録が必要です。少なくとも1つの通知先が参加確認されるまで、通知先には「保留中」と表示され、転倒通知システムは作動しません。

