

転倒通知画面（送信とキャンセル）

転倒が検出されると、通知送信するまでのタイマーが作動、カウントダウンが始まります。

送信

タイマーが切れると
通知メッセージが送信。
「通知を送信」をタップすると
直ぐにメッセージを送信。



通知メッセージを送信すると、
補聴器が「通知します」と
2回 音声案内します。




キャンセル

通知をキャンセルする場合は、
「通知をキャンセル」をタップ、
または補聴器の操作ボタンを押すことで
通知をキャンセルできます。



通知をキャンセルすると、
補聴器が「通知をキャンセルします」
と2回 音声案内します。

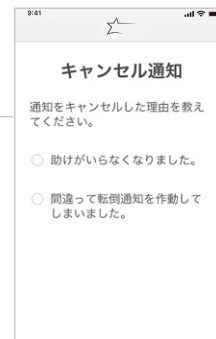

転倒検出の精度向上の為、
通知をキャンセルした理由を
選択してください。