

ビデオ通話を利用して、補聴器の調整をオンラインで受けることができます。この遠隔調整システムを利用するには、予め補聴器販売店で補聴器の設定が必要になります。また、アプリ内でこの機能を設定する際に、販売店と通信を行うための販売店コード(6桁暗証コード)登録が必要になります。

- 1 設定メニューから  **TeleHear オンライン調整** を選択します。
- 2 クラウドサービスにサインインされていることが表示されます。(機種によって表示されない場合もあります)。サインインした時にクラウド接続が確立されます。
- 3 接続先の販売店名または対応するスタッフ名が表示されます。
接続先をタップすると、営業時間など店舗情報を確認することができます。
- 4 販売店に調整を依頼した時間になったら、「ビデオ通話を始める」をタップします。
- 5 販売店の対応するスタッフとビデオ/音声通話しながら、
補聴器の調整を受けることができます。

※ 一部の店舗ではご使用できない場合があります。詳しくは、補聴器販売店にお尋ねください。

