



1

電池の出し入れ・充電方法

あなたの補聴器の電池タイプはこちらです

☒ 充電  → Aへ

☒ 10A (PR536) 
☒ 312 (PR41)  → Bへ

☒ 13 (PR48) 

A 充電式

充電方法

補聴器を充電器(チャージャー)に設置します。

フェイスプレート(充電端子「+」が付いている面)を下に向けて置きます。自動的に補聴器の電源が切れ、充電が始まります。

表示ランプの状態

- ・白色に点滅: 充電中
- ・白色に点灯: フル充電


注意: コンセント未接続でフル充電にした場合、ランプ点灯後「消灯」する省エネ仕様となっております。

補聴器を充電ポートから取り外すと、自動的に電源が入ります。



B 電池交換式

新しい電池のシールをはがす

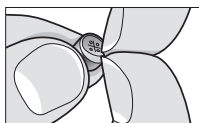


新しい電池から色付きのシールをはがします。シールを取り外してから3~5分待ってから、電池を挿入します。


※電池に湿気がついていない場合には、拭き取ってから入れてください。

電池交換式


電池の出し入れ方法

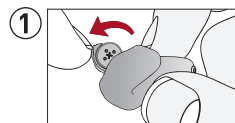



電池ドアの突起(凸)を爪で引っ掛けてそっと開きます。

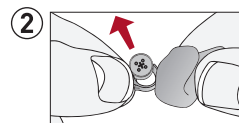

古い電池を取り外します。

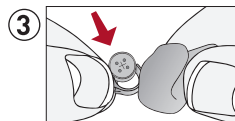

新しい電池のプラス面(シールが貼られていた面)を上にして、電池ドアにしっかりとのせます。

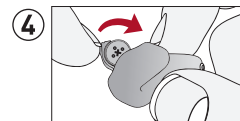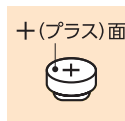

電池ドアを閉じます。

2


耳への着け方

補聴器(左耳/右耳)の確認

青い印字は左耳、
赤い印字は右耳
の補聴器です。


ブラックの場合

「L」は左耳
「R」は右耳
の補聴器です。

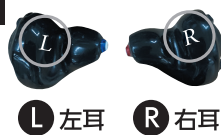


ITC / ITE の場合

①

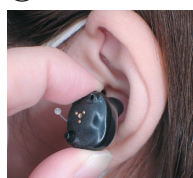


耳の穴の前に合わせて、親指と人差し指で補聴器をしっかり持ち、まっすぐ耳の中に入れてください。

②

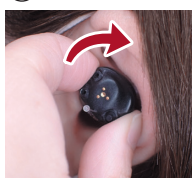

後方に(背中側)に回しながら外耳道にそっと入れます。


③

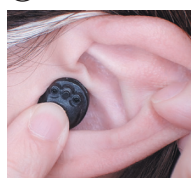

指先で、そっと押し込みます。


IIC / CIC の場合

①

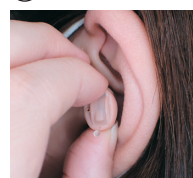


耳の穴の前に合わせて、親指と人差し指で補聴器をしっかり持ち、まっすぐ耳の中に入れてください。

②

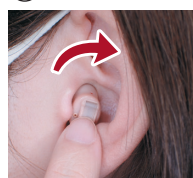

後方に(背中側)に回しながら外耳道にそっと入れます。

③

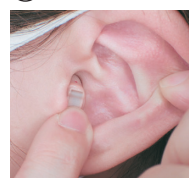

指先で、そっと押し込みます。

3

耳からの外し方

ITC / ITE の外し方



□ テグスあり (IIC / CIC)

テグスをつまんで水平(抜けない場合、若干後上方)にゆっくり引き出してください。

IIC / CIC の外し方



4

充電・保管方法

補聴器を使用していない時、特に就寝時には保管します

充電式

補聴器をご使用にならない場合は、やわらかい布で補聴器を拭いてから充電器の蓋を閉めて保管します。
※長期間、補聴器を使用されない場合は取扱説明書をご確認ください。



電池交換式

補聴器の電池は乾燥に弱いため、乾燥ケースに入れるときは、必ず外してください。

電池はふたの上面の電池置きシートに置きます。磁石が付いているので、平らな面(+)極)



1


電池の出し入れ・充電方法

あなたの補聴器の
電池タイプは
こちらです

充電



Aへ

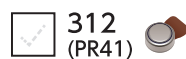312
(PR41)13
(PR48)

Bへ

A 充電式

充電方法

補聴器を充電器
(チャージャー)
に設置します。耳栓やイヤモールドが本製品の内側に向かって収まるように置きます。
自動的に補聴器の電源が切れ、充電が始まります。

表示ランプの状態


- ゆっくり点滅: 充電中
- 点灯: フル充電
- はやく点滅: エラー

補聴器を充電ポートから取り外すと、自動的に電源が入ります。

B

電池交換式


新しい電池のシールをはがす

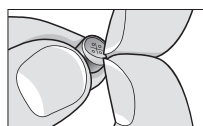新しい電池から色付きのシールをはがします。
シールを取り外してから3~5分待ってから、電池を挿入します。

※電池に湿気がついている場合には、拭き取ってから入れてください。

電池の出し入れ方法

①

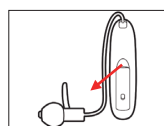

電池のフタ上のくぼみに爪をあて、矢印の向きに開きます。

②




電池のフタを開けて、使用済みの電池を取り出します。

③



新しい電池のプラス面(シールが貼られていた面)を上にして、電池ドアにしっかりとのせます。

④

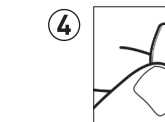

電池ドアを閉じます。

2


耳への着け方

補聴器(左耳/右耳)の確認

RIC


レシーバーの先端が
青は左耳、赤は右耳
の補聴器です。

BTE

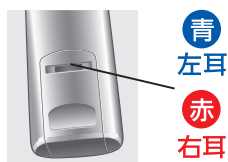背面の左右識別バーが
青は左耳、赤は右耳
の補聴器です。

着け方

①

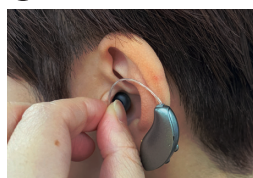

親指と人差し指で、レシーバーの前の曲がり角でケーブルを持ちます。

レシーバーを外耳道に挿入します。

②



補聴器を耳の後ろに置きます。

手順が逆(②→①)でも装着できます。扱いやすい手順をお試しください。

あなたの補聴器で使う
イヤピースまたはイヤモールドはこちらです既成タイプ
(イヤピース)

- ☐ シリコンモールド
- ☐ 中空シリコンモールド
- ☐ ヘルリクスモールド
- ☐ オープンチップ
- ☐ クローズチップ
- ☐ スマートチューブシリコンモールド

カスタムタイプ
(イヤモールド)

- ☐ BTE 標準チューブ
- ☐ BTE 細チューブ

※お買い上げの販売店にて定期的な交換をおすすめします。

3

耳からの外し方

外し方

①



耳の中からイヤピースを取り出してください。補聴器本体を耳の後ろから外してください。

②

! 外す際は、補聴器本体を引っ張らないでください。
接続部が損傷する可能性があります。

4

充電・保管方法

補聴器を使用していない時、特に就寝時には保管します

充電式

補聴器をご使用にならない場合は、やわらかい布で補聴器を拭いてから充電器の蓋を閉めて保管します。
※長期間、補聴器を使用されない場合は取扱説明書をご確認ください。

電池交換式

補聴器の電池は乾燥に弱いため、乾燥ケースに入れるときは、必ず外してください。

電池はふたの上面の電池置きシートに置きます。磁石が付いているので、平らな面(+極)