

Livio AI / Livio補聴器を Android端末で操作するには



一部のAndroid端末（例：GalaxyやPixelなど）では、専用アプリからLivio AI/Livio補聴器を操作することができます。対応可能な機種は、スマートフォンの互換性についてのホームページ (<https://www.starkeyjp.com/hearing-aids/thrive-hearing/smartphone-compatibility>) からご確認ください。

専用アプリをダウンロードする

- 1 Playストアを開きます。
- 2 Starkey Thriveと入力し、Thrive Hearing Controlを検索します。右のQRコードを読み込んでアクセスすることもできます。
- 3 「インストール」をタップしてダウンロードします。
- 4 ダウンロードが終わったら、アプリのアイコンをタップして、初期設定を行います。初期設定の手順については裏面をご覧ください。



Livio AI / Livio補聴器とAndroid端末をペアリングする

Android端末から補聴器の操作を行う場合は、双方を連動させるためにペアリングする必要があります。

※Android端末のBluetooth®設定画面から、接続可能な補聴器を選択してペアリングすることもできます。

以下の手順に従って、ペアリングを行ってください。

- 1 Thriveアプリを起動させます。
- 2 本紙裏面の手順①～③を完了させると、接続可能なデバイス（補聴器）名が表示されます。この時、補聴器だけでなく周囲にあるBluetooth機器すべてが読み込まれ、表示されます。
- 3 画面に表示された接続可能なデバイスの中からペアリングする補聴器名をタップして接続します。
- 4 画面が接続中になります。
- 5 ペアリングが成功すると、次の画面に変わります。ペアリングが失敗してしまったら、再スキャンしてください。


※ CROS 補聴システムをご使用の場合、受信機側の補聴器のみ表示されます。



専用アプリ [Thrive アプリ] のアカウント設定とクラウド接続手順




Thriveアプリを使用するためには、以下の設定を行う必要があります。

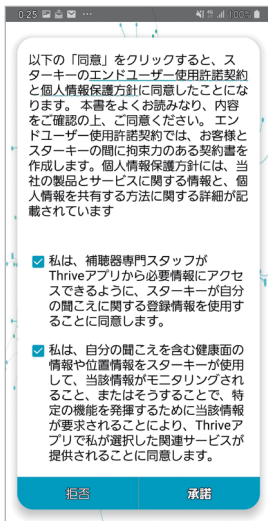


① 使用許諾契約 / 個人情報保護方針の確認

エンドユーザー使用許諾契約に同意「承諾」してください。内容を確認していただき、2つのボックスにチェックを入れて「承諾」をクリックします。

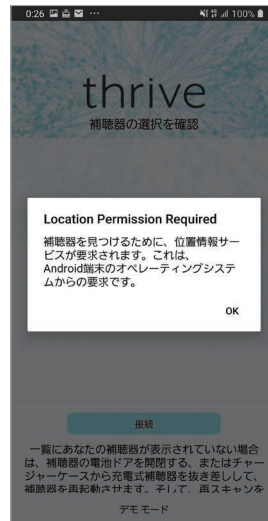

② 位置情報サービスの設定 端末の設定

Android端末に位置情報の利用を許可「OK」してください。補聴器とペアリングする為にBluetoothを使って補聴器をさがします。

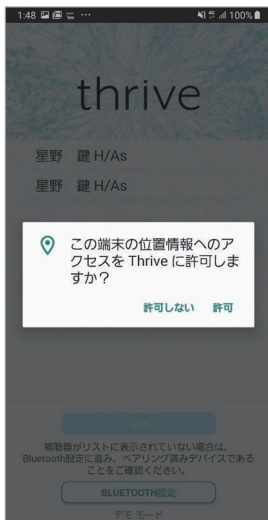

③ 位置情報サービスの設定 アプリの設定

Thriveアプリに位置情報の利用を「許可」してください。ジオタグによる位置情報の利用のために使用されます。

※ Androidの設定 > セキュリティ&位置情報 > 位置情報サービス > Thrive にて設定



④ 補聴器のペアリング

ペアリングできるデバイス(補聴器)が表示されます。

※ アプリで操作する補聴器をタップ > 接続にて設定

※ CROS 補聴システムをご使用の場合、受信機側の補聴器のみ表示され、アプリと接続します。



⑤ アドバンスモードの選択

「アドバンスモード」にしてください。

※ Thriveアプリの設定メニュー > アプリの設定 にて設定



⑥ クラウド接続

使用ユーザー個人のアカウントにてクラウドに接続してください。

Facebookアカウントか、Googleアカウント、もしくは「アカウントの作成」(メールアドレス登録)を行ってクラウドにサインインします。

※ Thrive アプリの設定メニュー > どこでも聴覚ケア > サインインにて設定

(例)最終同期日: 2019/06/05が更新されていればクラウド接続は完了です。