



Hear better. Live better.

スターキージャパン株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23 3F
Tel.045-475-9701 Fax.045-475-9706

 **0120-045-190**
フリーダイヤル




スターキー

検索

みまもり機能

Thrive Care (スライブケア) アプリ

設定ガイド

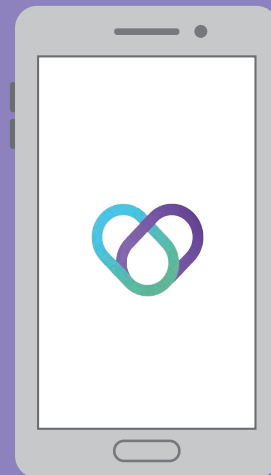

Thrive(スライブ)アプリ みまもり機能とは



補聴器装用者が利用するアプリと、ご家族や介護者が利用するアプリとの連携で補聴器装用者の健康管理データがモニタリングできる機能です。

身体活動



コミュニケーション



みまもられる



補聴器装用者

補聴器アプリ
Thrive



みまもる



ご家族・介護者

みまもりアプリ
Thrive Care




今日も
元気みたい



補聴器装用者の スマートフォン

※ 制限がありますので事前にご確認ください
「スマホの接続性」をQRコードで簡単チェック
対応・非対応の結果がアイコン表示されます。

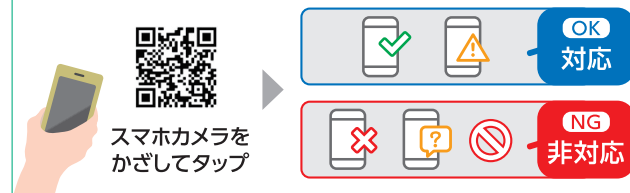

補聴器アプリ Thrive(スライブ)

無料 ダウンロード



Android



iPhone



※ iOS14以上

対応機種

- Evolv AI / 2400, 2000, 1600, 1200
- Livio Edge AI



CIC 312 ITC R ITE R RIC R RIC 312 BTE R BTE 13 BTE PP



『共有相手』を設定する



クラウドサービスにサインインしていない場合はサインインしてください。

※サインイン済の場合は表示されません

設定方法ビデオ




① 共有する方の名前とメールアドレスを入力します。

② 補聴器装用者自身「あなたのお名前」を記入します。


③ スライダーをタップして、共有したいデータを選択します。

補聴器の使用状況、電池残量、接続状態、歩数の情報は自動で共有されます。(後から変更可能) 詳細はP13

④ 「送信」をタップ。

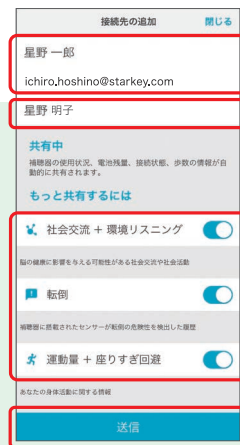

送信が完了すると

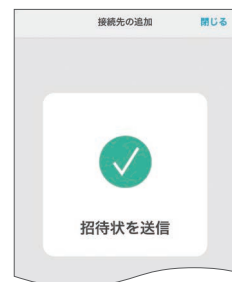

招待メールを送信済みであることが表示されます。



「接続を保留中」の下に表示され、招待状が受諾されると、保留中から接続済みに移動します。

家族や介護者側のスマートフォン



みまもりアプリ
Thrive Care (スライブケア)
無料ダウンロード



Android



※Android OS 6.0 以上に対応

iPhone



※iOS12 以上に対応




補聴器装用者のアプリと みまもりアプリを接続連携する

アカウント作成



アプリを立ち上げ
「開始」をタップ。

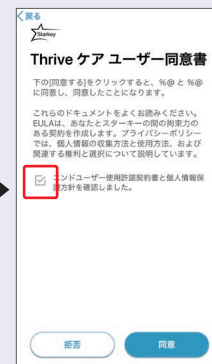

- ① 同意書を読み確認
後 ☐ をタップして
✓マークを入れる。
- ② 「同意」をタップ。



「招待状が届きました」
をタップ。

補聴器装用者のアプリと みまもりアプリを接続連携する(続き)

アカウント作成(続き)

ようこそ！
あなたのお名前をお知らせください
招待を確認するには名前が必要です。

星野一朗

続ける

① ご自身の「名前」を入力。

こんにちは、星野一郎さん！
あなたのメールアドレスをお知らせください。

招待を確認するにはメールが必要です。

ichiro.hoshino@starkey.com

続ける

② ご自身の「メールアドレス」を入力。

パスワードを作成してください。
8文字以上にしてください。

パスワードの保存

パスワードの確認

確認メール 見本

Thrive Careの
メールを確認

Starkey Hearing Technology... 7月23日

こんにちは、星野一郎さん。

ここにち、星野一郎さんが「Thrive Care」アプリへの登録を招待しています。Thrive Careは、センサーが搭載された最新補聴器を使用して、ご家族や友達、または介護関係者と、補聴器ユーザーの健康関連情報を共有できるアプリです。

いつでも、どこでも、健康や安全面などの情報を確認することができます。

Thrive Careでは、補聴器ユーザーが自立した生活を送ることができるように設計されています。


https://ask.thrivecareanywhere.com/ConfirmEmail?code=ichiro.hoshino@starkey.com&code=CDJBN4YM2PPO56plNBB7L3UhuOnQAG9wrm724P8eha8GwJawu0A5G8Senn8v29NAJ7U070V4ALGwSc7m48i09bn8u1Ohn%2F25w23Bd7Ccb_ZefvJf8d7m8iLQJ7M445Z5kFcmF5Ganythw8COQaneu4TolJ4u8d8ToshaMc5288m52F4yC23AGnd9D8w2043oa8CZ8UJLMCGJawu015Nv2B4G8B8wC184x3oaKK8a8uQa8L4YmuC8w53D53D

あなたがメールアドレスの登録を求めている場合は、このメールを無視してください。

ThriveCare アプリ

③ 確認メール(Thrive Careのメールを確認)内のリンクをタップ。

④ アカウント作成完了。

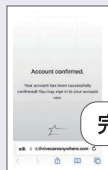

完了画面

接続連携

招待メール 見本

星野明子さんがあなたを
ThriveCareに招待しています

Thrive 11月8日

ここにち、星野明子さんが「Thrive Care」アプリへの登録を招待しています。Thrive Careは、センサーが搭載された最新補聴器を使用して、ご家族や友達、または介護関係者と、補聴器ユーザーの健康関連情報を共有できるアプリです。

いつでも、どこでも、健康や安全面などの情報を確認することができます。

Thrive Careでは、補聴器ユーザーが自立した生活を送ることができるように設計されています。

① メモする

② リンクをタップ

6357SR

Google Playストアへのリンク: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.starkey.careliveai>
App Storeへのリンク: <https://apps.apple.com/jp/app/starkey-thrive-care/id1483221109>

開くをタップ。

Today

Thrive Care
Starkey Laboratories

開く

アップデート バージョン履歴

バージョン 1.2 7か月前

Thrive Careは、EvolvAIまたはLiveEdge AI補聴器を装着している人に関する重要な健康情報を確認し、共有できる世界初のアプリです。T: さらに表示

プレビュー

Jane Doe
100
Steps

Thursday, Jan. 14

Today ホーム App App Store

① 「6文字の暗証コード(確認番号)」を入力。

招待状には6文字の暗証コードが含まれています。以下に入力してください。

G 3 5 7 S R

続ける

② 「招待を受ける」をタップ。

運動量 + 歩行リミット
社交交流 + 環境リスニング
転倒

招待を受ける

無料で安全なみまもりアカウントです。

連携
完了




🏠 ホーム画面

各健康データの確認

A 補聴器の電池残量など

電池マークをタップすると、補聴器の接続状態を確認できます。

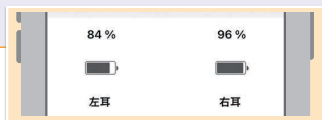

B 補聴器装用者のイニシャル

表示している補聴器装用者のイニシャル表示。複数の装用者を登録している場合、イニシャルをタップすると、別の装用者に切り替えることができます。

C 表示データの日付

初期表示は本日の日付です。過去の履歴を表示するには、右 / 左の矢印マーク(< >)をタップ、または日付をタップすると、カレンダーが表示され、過去の日付を選択できます。

D 健康スコア

健康スコアは、「●スコア：身体健康スコア」と「●社会参加スコア：脳の健康スコア」で構成され、毎日リセットされます。装用者は、それぞれ最高100点/1日まで獲得できます。(合計最高200点) [詳細はP13へ](#)



E 健康スコア詳細

各スコアの詳しい情報をスクロールして確認できます。

[詳細はP13へ](#)



通知サービス画面 通知メッセージ




設定メニュー画面 各設定の変更など



健康スコアの詳細

スクロールして
タップすると、
各スコアの詳しい
情報を確認できます。

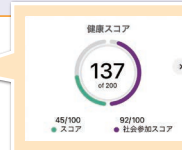

スコア(点数)で運動量や
目標がひと目でわかります。

スコアは、心と身体
全体の健康を
示す指標となります。

身体からだの健康スコア

歩数	40点
運動量	40点
座りすぎ回避	20点

脳のうの健康スコア

使用時間	40点
社会交流スコア	40点
環境リスニング スコア	20点
合計	最高 200点



歩数

毎日1万歩以上歩く
ことが理想



運動量

運動した時間(分)と
消費カロリーを記録



座りすぎ回避

1時間に1分以上身体を
動かすことで座りすぎを回避




使用時間

補聴器を毎日12時間以上
使用することが理想



社会交流スコア

会話や補聴器からの
音声ストーリーミングに費やした
時間を計測

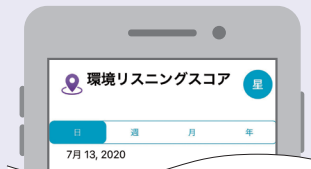

環境リスニングスコア

自宅、屋外、音楽聴取など、
あらゆる環境で補聴器が
使われているか計測



転倒

装着者が転倒したことを
検知した履歴を表示