




補聴器装用者のスマートフォン

※ 制限がありますので事前にご確認ください
「スマホの接続性」をQRコードで簡単チェック
対応・非対応の結果がアイコン表示されます。

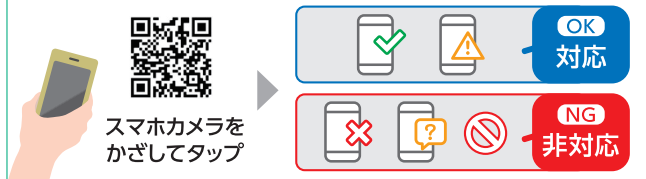

補聴器アプリ Thrive (スライブ)

無料ダウンロード



Android



iPhone



※ iOS14以上

対応器種

● Evolv AI / 全クラス対応 ● Livio Edge AI



スターキージャパン株式会社

〒222-0033 神奈川県横浜市新横浜2-6-23 3F
Tel.045-475-9701 Fax.045-475-9706

0120-045-190

フリーダイヤル




スターキー

検索

転倒通知機能

Thrive (スライブ) アプリ

設定ガイド

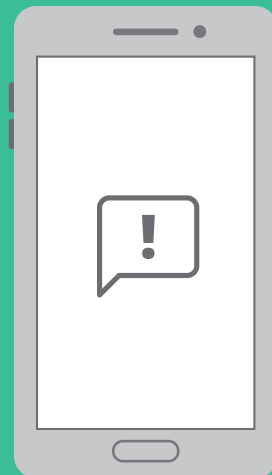

つながる
安心




Thrive(スライブ)アプリ 転倒通知とは



補聴器に内蔵された2種類のセンサーで、補聴器装用者の転倒を検知して、予め登録された連絡先へ自動的に通知します。離れてくらしていても、装用者の安全を確認できるご家族など通知を受けた側も、装用者をみまわれる安心感を持って生活できます。

転倒を自動検出発信

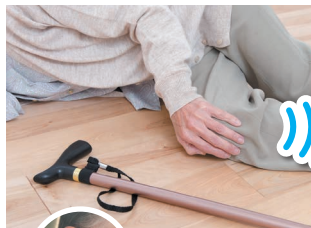

SOS発信

補聴器装用者

補聴器アプリ
Thrive



ご家族が受信



!この位置は
自宅だ

通知を開いたことを
装用者に再通知

ご家族・介護者

携帯電話

1 2つの通知方法

自動通知

転倒が検出されると
自動的に送信



手動通知

補聴器装用者自身で
操作ボタンを押して送信



SOS発信

店舗でのフィッティング
調整で操作ボタンの設定
が必要です。補聴器販売
店にご相談ください。

2 通知先は 最大3つ登録可能


スマホ
じゃなくても
OK!

予め登録した携帯電話の連絡先に送信できます。

* Thriveケア「みまもりアプリ」を利用することで通知先の制限
はなくなります。




通知を送信する設定

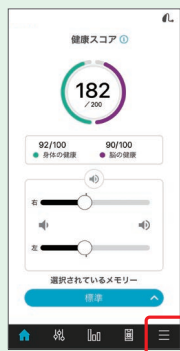

設定メニューを
タップ。



「転倒通知」を
タップ。

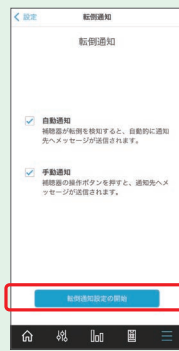


「転倒通知設定の
開始」をタップ。

クラウドサービスにサインインして
いない場合はサインインしてください。

※サインイン済の場合は
表示されません

設定方法ビデオ

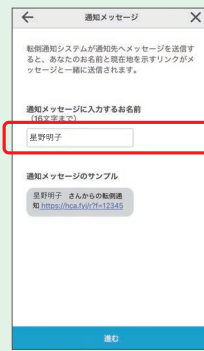

装用者自身の名前を
入力。
下に通知メッセ
ージのサンプル
が表示されま
す。



通知相手の「名前」と
「携帯の電話番号」を
入力。


少なくとも1つの通知先が参加確認するまで、通知先には
「保留中」と表示され、転倒通知システムは作動しません。

※ 72時間以内にP05の設定に進んでください。




通知を受信する設定


※ 転倒通知のリクエストを受けてから
72時間以内に完了が必要です。

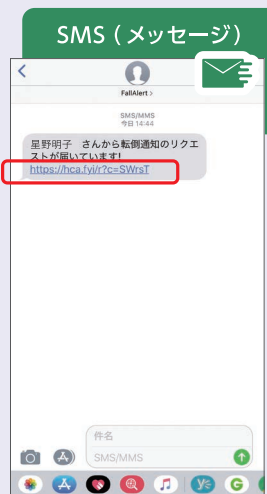


SMS (iOSの場合“メッセージ”アプリ)を開き、「FallAlert」から届いたリンクをタップ。

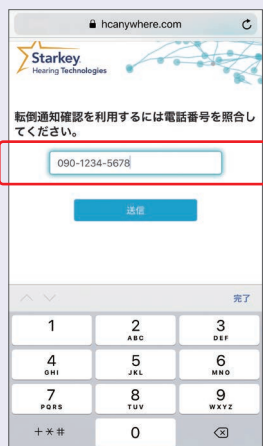

- ① 自身の携帯電話番号を入力。
- ② 「送信」をタップ。

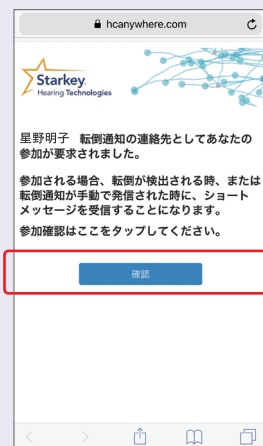

「確認」をタップして転倒検出通知システムへの参加を確認。

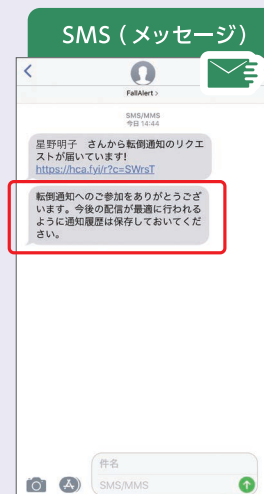

参加確認のメッセージが再度「FallAlert」より届いて完了。




通知送信画面

転倒を検出する / 手動通知すると、送信するまで
タイマーが作動、カウントダウンが始まります。

「通知をキャンセル」すると、補聴器
から「通知をキャンセルします」と
2回音声案内します。

精度向上の為、通知を
キャンセルした理由を
選択してください。――

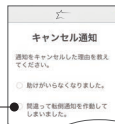

通知送信すると、補聴器から
「通知します」と2回音声案内します。



家族や介護者側



通知はSMSへ届きます。リンク先を
タップし ①電話番号を入力すると
②場所が特定され地図が表示されます。



装用者側

補聴器から「送信されました」と2回音声案内され、
通知が開かれたかどうか装用者も知ることができます。



システム設定（通知先の追加）

設定メニュー
☰をタップ

「転倒通知」を
タップ

「システム設定」を
タップ


通知先

通知先は3人まで登録で
きます。通知先の名前・電
話番号の変更ができます。




通知タイマー

通知されるまでに60秒または
90秒のどちらかが選択できます。

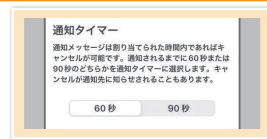





通知登録を停止する

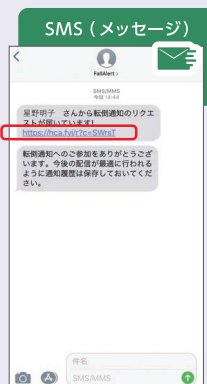


通知メッセージ内の
リンク先をタップ。

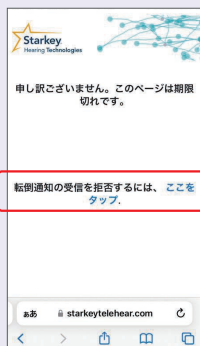


「ここをタップ」を
タップ。

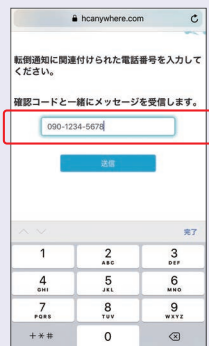

- ① 携帯電話の番号を
入力。
- ② 「送信」をタップ。

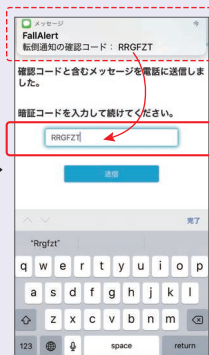

- ① SMSで確認コード
を受信。
- ② 受信した確認(暗証)
コードを入力。
- ③ 「送信」をタップ。

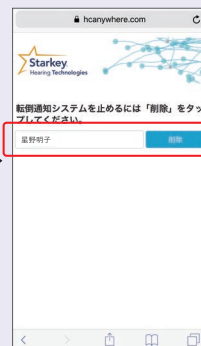

「削除」をタップ。



削除が完了すると
通知受信を止めたこ
とが補聴器装用者に
通知されます。