

Apple iOS 端末 (iPhone/iPad) 専用



Thrive (スライブ) セットアップガイド


セットアップガイド

Evolv AI 補聴器はスマートフォンのアプリに連動させることで、かんたん便利にさまざまな機能を操作することができます。



ご使用のモバイル端末は Thrive アプリに対応しているかを下記の QR コードで簡単にチェックできます！

「スマホの持続性」をQRで簡単チェック
対応・非対応の結果がアイコン表示されます。

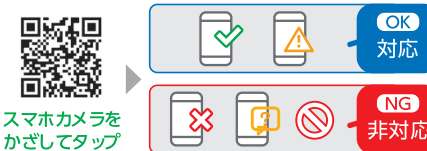

スマホカメラをかざしてタップ

INST00109-01-JJ-JP JPYIN-109



手順 1 | iPhone

モバイル端末の互換性確認とアプリのダウンロード

Thrive (スライブ) アプリは、あなたの補聴器と互換性があるスマートフォンを利用して、補聴器をより簡単・便利に操作できるようにします。

- 必ずご使用のモバイル端末が対応機種であるかどうかを確認します。左下の「**スマホの接続性**」を QR で簡単チェックをご利用ください。
- ご使用の補聴器名 (Evolv AI) をタップし、モバイル端末の互換性があり、対応している場合、「Thrive アプリをダウンロード」の青いボタンが表示されます。このボタンをタップするとアプリストアに切り替わりダウンロードできます。



手順2 | iPhone

あなたの補聴器をモバイル端末とペアリングします。

以下の手順に従い、補聴器とあなたのモバイル端末 (iPhone など) をペアリングします (補聴器とモバイル端末の通信が切れた場合も、同様に以下の手順で回復させます)。

- モバイル端末の**設定アイコン**をタップし、**アクセシビリティ**へ進み、**ヒアリングデバイス**をタップします (**Bluetooth** の設定がオフになっている場合は、双方を通信させるために**オン**にします)。
- 補聴器の電源を一旦オフにしてから再びオンにします。(ペアリングモードが起動されます)。
- MFi ヒアリングデバイス**の欄に、補聴器名 (例えば、あなたのお名前など) が表示されます。表示された補聴器名をタップします。
- 画面上に別の画面が、補聴器ごとに表示されます (右または左)。この画面をタップすることで補聴器がモバイル端末にペアリングされます。

ご注意：モバイル端末にペアリングできる補聴器の数は左右一組だけです。CROS 補聴器の場合は受信機のみペアリングできます。



手順3 | iPhone

アプリをセットアップします。


Thrive アプリを開きます。開始をタップして、セットアップを開始します。

- ユーザー同意書 (使用許諾契約書と個人情報保護方針) を確認してください。続けるには、「**同意**」をタップします。
- アカウントを作成し、アプリにサインインします。
 - メールアドレスとパスワード (8 文字以上) を入力してください。または、
 - Apple、Facebook、Google アカウントも使用できます。使用されるアカウントのボタンをタップしてください。「続ける」をタップします。
- 補聴器を接続します。画面の指示に従い、補聴器とアプリを設定します：
 - 補聴器が十分に充電され、電源がオンになっていることを確認してください。
 - 「**続ける**」をタップします。
 - アプリがあなたの補聴器を見つくと、メッセージが表示されます。「**続ける**」をタップします。
- 各設定に対して、アプリがあなたに許可を求めています。
 - 許可を求めるメッセージが表示されます。「**OK**」または「**続ける**」をタップします。
 - アプリのホーム画面の概要が表示され、アプリの主機能を確認します。
 - OK をタップします。

アプリがあなたの補聴器を見つけれなかった場合、Bluetooth がオンになっているか、モバイル端末とペアリングされているかを確認してください。ペアリングが切れている場合は、手順 2 に戻って、モバイル端末と補聴器をペアリングしてください。

Thrive アプリ ホーム画面の機能

ホーム画面

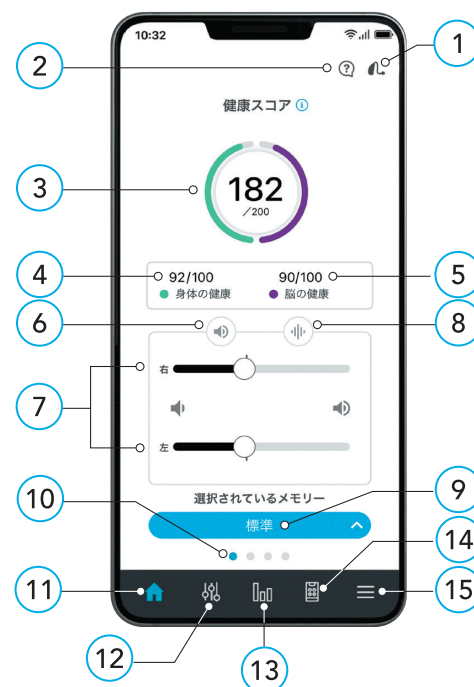

- 補聴器との接続状態**：接続切れの場合は **!** マークが表示されます。
- Thrive アシスタント**：タップすると音声アシスタントが起動し、あなたが質問したことに答えてくれます。
- あなたの健康スコア**：あなたの健康が点数計算されて表示されます。身体と脳の健康スコアの合計ポイントになります。最大 200 ポイントまで表示します。
- 身体の健康スコア**：歩数、運動時間、立ち上がり動作 (座りすぎ回避) の回数が点数計算され、表示されます。最大 100 ポイントまで表示します。
- 脳の健康スコア**：補聴器の使用時間、音声を聞いている (社会交流) 時間、環境の変化 (環境リスニング) 時間が点数計算され、表示されます。最大 100 ポイントまで表示します。
- ミュート (消音)**：タップすると補聴器マイクを消音にすることができます。
- ボリュームスライダー**：左右にスライドさせて、音量を調節します。
- 瞬間快適化ボタン**：タップすると、周りの雑音を抑えて、補聴器からの聞き取りを瞬間的に快適にします (本機能についての詳しい情報は、アプリ操作ガイドの「Edge モード」または「コンフォートブースト」をご覧ください)。
- メモリーボタン**：補聴器のプログラムが表示されます。タップすると、用途別に保存されているプログラムを選択することができます。

- 画面切り替え**：CROS 補聴器の使用、耳鳴治療音が設定されている方は、スワイプして、専用画面に切り替えます。
- ホーム**：ホーム画面に戻るアイコンです。
- きこえのカスタマイズ**：イコライザーなどにより、補聴器の音質をあなた好みにかんたん調整できます。
- 健康スコアのデータ**：各項目のデータを細かく確認できたり、目標値の設定を変更できます。
- アクセサリ**：アクセサリ (別売り) を使用する場合に、ストリーミングの開始や停止、音量調節が操作できます。
- 設定メニュー**：タップすると、さまざまな設定や便利な機能を利用できるメニューが表示されます。利用可能な設定や機能についての詳しい情報は、下記の QR コードからご覧いただけます。



QR コード
(アプリ操作動画)



QR コード
(アプリ操作ガイド)

Android 端末専用



Thrive (スライブ) セットアップガイド

セットアップガイド

Evolv AI 補聴器はスマートフォンのアプリに連動させることで、かんたん便利にさまざまな機能を操作することができます。



ご使用のモバイル端末は Thrive アプリに対応しているかを下記の QR コードで簡単にチェックできます！

「スマホの持続性」をQRで簡単チェック
対応・非対応の結果がアイコン表示されます。



INST00109-01-JJ-JP JPYIN-109




手順 1 | Android

モバイル端末の互換性確認とアプリのダウンロード

Thrive (スライブ) アプリは、あなたの補聴器と互換性があるスマートフォンを利用して、補聴器をより簡単・便利に操作できるようにします。

- 必ずご使用のモバイル端末が対応機種であるかどうかを確認します。左下の「**スマホの接続性**」を **QR で簡単チェック**をご利用ください。
- ご使用の補聴器名 (Evolv AI) をタップし、モバイル端末の互換性があり、対応している場合、「Thrive アプリをダウンロード」の青いボタンが表示されます。このボタンをタップするとアプリストアに切り替わりダウンロードできます。

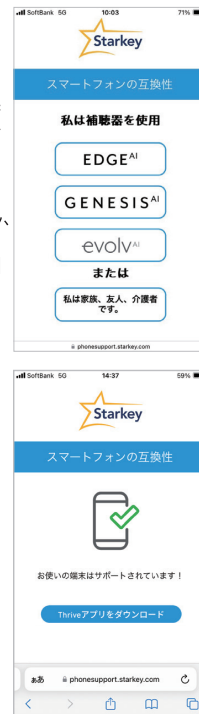

手順2 | Android

アプリをセットアップし、補聴器とペアリングします。

以下の手順に従い、補聴器とあなたのモバイル端末をペアリングします（補聴器とモバイル端末の通信が切れた場合も、以下の手順で回復させます）。

- モバイル端末の設定アイコンをタップします。
- Bluetooth の設定がオンになっていることを確認します。
- 補聴器の電源を一旦オフしてから再びオンにします。（ペアリングモードが起動されます）
- Thrive アプリを開きます。「開始」をタップします。
- ユーザー同意書（使用許諾契約書と個人情報保護方針）を確認してください。続けるには、「同意」をタップします。

アプリにサインインします。

- アカウントを作成します。
 - メールアドレスとパスワード（8文字以上）を入力してください。または、
 - Facebook、Google アカウントも使用できます。使用されるアカウントのボタンをタップしてください。「続ける」をタップします。
- 開始するに辺り、位置情報の利用に許可を求める画面が表示されます。
 - 内容を確認し、「OK」または「続ける」をタップします。



手順3 | Android

3. 画面の指示に従い、以下を設定します：

- 補聴器の位置を示す位置情報の使用にアプリが許可を求めます。「許可」をタップします。
- 1 台以上の補聴器が検出された場合、検出された補聴器のリストが表示されます（両耳で補聴器を使用されている場合、右と左の補聴器が表示されます）。補聴器名の横にあるボックスをタップしてチェックマークを入れてから、**接続**をタップします。


ご注意：モバイル端末の Bluetooth 設定から直接、補聴器とペアリングを行うこともできます。CROS 補聴器の場合は受信機のみペアリングできます。

- アプリを使用する準備が整うと、メッセージが表示されます。**続ける**をタップします。
- アプリの基本的機能が設定されます。
- 「セットアップ」をスキップすると、アプリのホーム画面に戻ります。

Thrive アプリ ホーム画面の機能

ホーム画面

※ Android 端末は機種によって表示の見え方が違う場合があります。

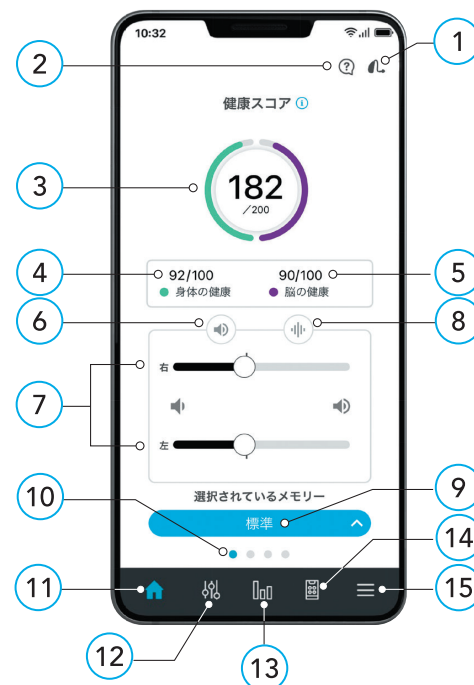

- 補聴器との接続状態**：接続切れの場合は **!** マークが表示されます。
- Thrive アシスタント**：タップすると音声アシスタントが起動し、あなたが質問したことに答えてくれます。
- あなたの健康スコア**：あなたの健康が点数計算されて表示されます。身体と脳の健康スコアの合計ポイントになります。最大 200 ポイントまで表示します。
- 身体**の健康スコア：歩数、運動時間、立ち上がり動作（座りすぎ回避）の回数が点数計算され、表示されます。最大 100 ポイントまで表示します。
- 脳**の健康スコア：補聴器の使用時間、音声を聞いている（社会交流）時間、環境の変化（環境リスニング）時間が点数計算され、表示されます。最大 100 ポイントまで表示します。
- ミュート（消音）**：タップすると補聴器マイクを消音にすることができます。
- ボリュームスライダー**：左右にスライドさせて、音量を調節します。
- 瞬間快適化ボタン**：タップすると、周りの雑音を抑えて、補聴器からの聞き取りを瞬間的に快適にします（本機能についての詳しい情報は、アプリ操作ガイドの「Edge モード」または「コンフォートブースト」をご覧ください）。
- メモリーボタン**：補聴器のプログラムが表示されます。タップすると、用途別に保存されているプログラムを選択することができます。

- 画面切り替え**：CROS 補聴器の使用、耳鳴治療音が設定されている方は、スワイプして、専用画面に切り替えます。
- ホーム**：ホーム画面に戻るアイコンです。
- きこえのカスタマイズ**：イコライザーなどにより、補聴器の音質をあなた好みにかんたん調整できます。
- 健康スコアのデータ**：各項目のデータを細かく確認できたり、目標値の設定を変更できます。
- アクセサリ**：アクセサリ（別売り）を使用する場合に、ストリーミングの開始や停止、音量調節が操作できます。
- 設定メニュー**：タップすると、さまざまな設定や便利な機能を利用できるメニューが表示されます。利用可能な設定や機能についての詳しい情報は、下記の QR コードからご覧いただけます。



QR コード
(アプリ操作動画)



QR コード
(アプリ操作ガイド)