


補聴器でテレビをストリーミングするための手順

StarLink TVストリーマー（以下スターリンク TV）はテレビのデジタル音声出力、アナログ音声出力のどちらにも接続することができます。

デジタル接続

光デジタル ケーブル使用

- ① 以下の図の通り、接続します。

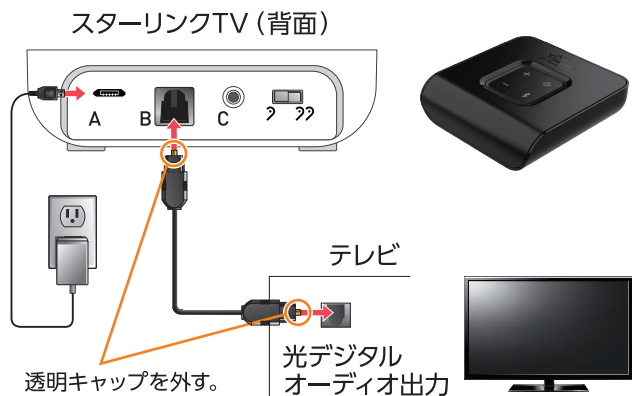

- ② テレビ、スターリンク TV（スターリンク TV は ）の電源ボタンを押してください。スターリンク TV がテレビの音声を検知すると表示ランプが青色に点灯します。
- ③ 補聴器がお近くのBluetooth機器に接続されていないことを確認して、補聴器の電源を一旦切って、入れなおします。
- ④ スターリンク TV の  ボタンを押します。青いランプが点灯から点滅の表示に変わります。
※すでにペアリング済の場合は③④をスキップできます。
- ⑤ 補聴器とつながるとランプが緑色に点滅します。赤色に点滅した場合は、緑色に点滅するまで、③～④を繰り返します。
- ⑥ テレビの音声が補聴器から聞こえてくることを確認します。この時、補聴器販売店で設定された、いずれかの方法から開始できます。
- 対応スマートフォンの Thrive または My Starkey アプリ：アクセサリ画面から「ストリーミングの開始/停止」します。
 - StarLink リモコン：☆ ボタンを押します。
 - 補聴器本体：ダブルタップ / ボタンを長押しします。

* 補聴器から音声が聞こえてこない場合：


テレビの音声出力形式が対応していない可能性があります。お使いのテレビの設定メニューから「デジタル音声出力」の設定を選択し、**PCM**形式に変更してください。

アナログ接続


RCA ケーブル使用

- ① 左のデジタル接続を参考に、テレビとスターリンク TV を接続します。異なる点は以下の通りです。

アナログ RCA (3.5mm)

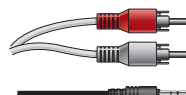


スターリンク TV に付属されている赤白ケーブルを使用して接続します。

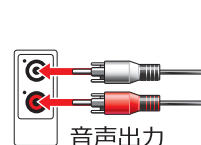

テレビ側に赤白の音声出力端子がある場合は、同じ色のケーブル端子を差し込みます。

（音声の出力形式が選択できるテレビの場合は、「固定」を選択してください）

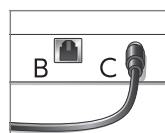


スターリンクTVの背面にある丸い差し込み口（図C）に反対側のケーブル端子を差し込みます。

* 音声出力の赤や白の端子が無いテレビの場合：

テレビによってはヘッドホン端子が「ヘッドホン/アナログ音声出力兼用」になっている可能性があります。まずは、音声出力の設定メニューにてご確認ください。

ヘッドホン端子にミニステレオ変換プラグで中継して RCA ケーブルを差し込むことができます。様々な形状の変換プラグが、家電販売店でご購入いただけますが、お求めの際は次の条件にあったものをお選びください。

- 1) 端子が RCAメス→3.5mm オス
- 2) 黄色の端子（映像用）が無いもの

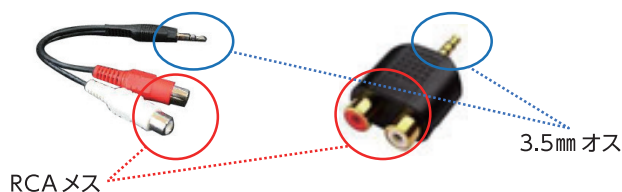

* テレビのヘッドホン端子がヘッドホン専用の場合に、テレビのスピーカーからも音声が聞こえるようにするには、テレビ側の設定が必要です。ご使用になるテレビの取扱説明書に記載されている「音声出力」または「音質」をご覧ください。設定を行うようにしてください。

- ② テレビとスターリンク TV が接続されたら、補聴器から音声が聞こえてくることを確認します。左側の「デジタル接続」の②～⑥を参考に行ってください。

外部機器（ブルーレイレコーダーなど）が、取り付けられている場合は、外部機器の取扱説明書もご覧ください。
以上を行っても、補聴器から音声が聞こえてこない場合は、お買い求めいただきました販売店までお知らせください。


補聴器でテレビをストリーミングするための手順

Edge TVストリーマー（以下エッジ TV）はテレビのデジタル音声出力、アナログ音声出力のどちらにも接続することができます。

デジタル接続

光デジタル ケーブル使用

- ① 以下の図の通り、接続します。

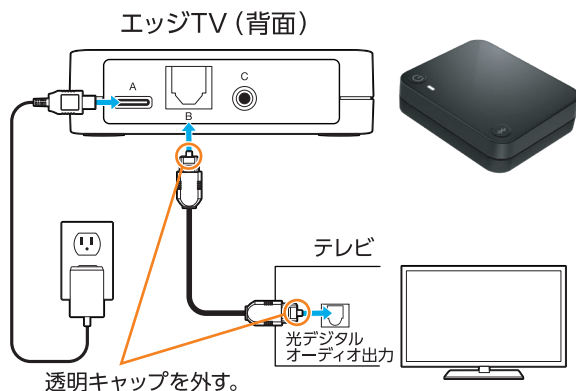

- ② テレビ、エッジ TV（エッジ TV は ）の電源ボタンを押してください。電源ボタンを押し、表示ランプが白色に点灯したらボタンを離します。エッジ TV がテレビの音声を検知すると表示ランプが青色に点灯します。
- ③ 補聴器がお近くのBluetooth機器に接続されていないことを確認して、補聴器の電源を一旦切って、入れなおします。
- ④ エッジ TV の ボタンを押します。青いランプが点灯から緑色に点滅表示に変わります。
※すでにペアリング済の場合は③④をスキップできます。
- ⑤ 補聴器とつながるとランプが緑色に点灯します。赤色に点滅した場合は、緑色に点灯するまで、③～④を繰り返します。
- ⑥ テレビの音声が補聴器から聞こえてくることを確認します。この時、補聴器販売店で設定された、いずれかの方法から開始できます。
- 対応 My Starkeyアプリ: アクセサリー画面から「ストリーミングの開始/停止」します。
 - StarLink リモコン: ☆ ボタンを押します。
 - 補聴器本体: ダブルタップ / ボタンを長押しします。

* 補聴器から音声が聞こえてこない場合：


テレビの音声出力形式が対応していない可能性があります。お使いのテレビの設定メニューから「デジタル音声出力」の設定を選択し、**PCM**形式に変更してください。

アナログ接続


RCA ケーブル使用

- ① 左のデジタル接続を参考に、テレビとエッジ TV を接続します。異なる点は以下の通りです。

アナログ RCA (3.5mm)

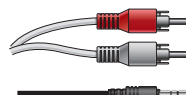


エッジ TV に付属されている赤白ケーブルを使用して接続します。

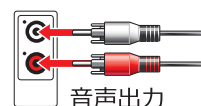

テレビ側に赤白の音声出力端子がある場合は、同じ色のケーブル端子を差し込みます。

（音声の出力形式が選択できるテレビの場合は、「固定」を選択してください）

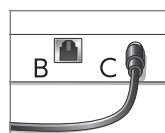


エッジTVの背面にある丸い差し込み口（図C）に反対側のケーブル端子を差し込みます。

* 音声出力の赤や白の端子が無いテレビの場合：

テレビによってはヘッドホン端子が「ヘッドホン/アナログ音声出力兼用」になっている可能性があります。まずは、音声出力の設定メニューにてご確認ください。

ヘッドホン端子にミニステレオ変換プラグで中継して RCA ケーブルを差し込むことができます。様々な形状の変換プラグが、家電販売店でご購入いただけますが、お求めの際は次の条件にあったものをお選びください。

- 1) 端子が RCAメス→3.5mm オス
- 2) 黄色の端子（映像用）が無いもの

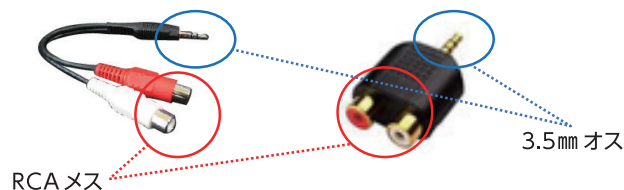

* テレビのヘッドホン端子がヘッドホン専用の場合に、テレビのスピーカーからも音声が聞こえるようにするには、テレビ側の設定が必要です。ご使用になるテレビの取扱説明書に記載されている「音声出力」または「音質」をご覧の上、設定を行うようにしてください。

- ② テレビとエッジ TV が接続されたら、補聴器から音声が聞こえてくることを確認します。左側の「デジタル接続」の②～⑥を参考に行ってください。

外部機器（ブルーレイレコーダーなど）が、取り付けられている場合は、外部機器の取扱説明書もご覧ください。
以上を行っても、補聴器から音声が聞こえてこない場合は、お買い求めいただきました販売店までお知らせください。