


スナップフィット アンクル レシーバー 取扱方法

【レシーバーの選択】

レシーバーサイズを選択するには、スケールを耳介上に水平に置き、外耳道の開口上部に最も近い線のサイズを選択します。


線と線の間で迷う場合には、小さい方のサイズを選択します。

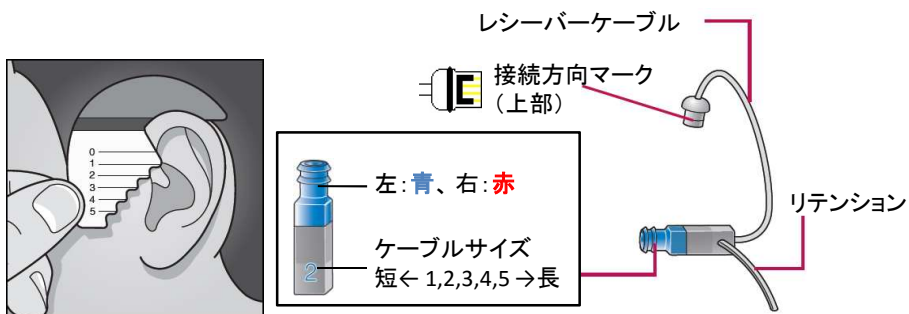

【レシーバーの取り外し】

レシーバーを右図のように指で挟み、反対の手で本体を固定し、まっすぐに引き抜きます。

手でうまく取り外しができない場合、付属のレシーバー取り外しツールを右写真の様に使用します。

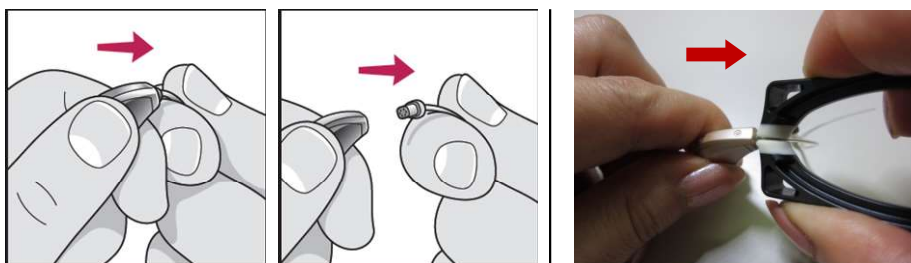


※取り外しツールを使用した場合

【レシーバーの取り付け】

レシーバーと本体をまっすぐに持ち、奥までしっかり差し込みます。

 マークを上にして接続します。

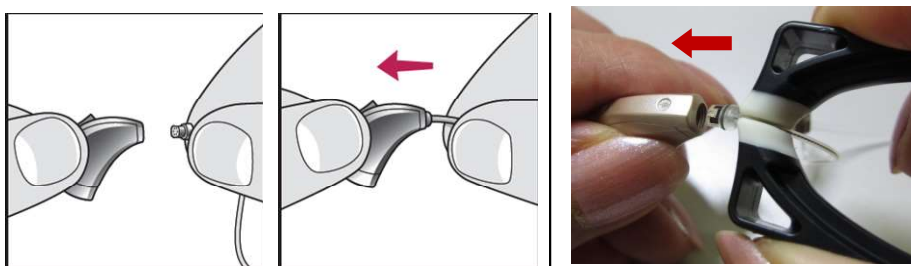

※取り外しツールを使用した場合

【レシーバーのメンテナンス】

イヤチップを外し、ワックスガードの清掃、または交換を定期的に行ってください。

