

- 警告** 取り扱いを誤った場合、人の死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。
- 注意** 取り扱いを誤った場合、人が損傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容です。

安全にお使いいただくために

- 警告**
 - 補聴器本体を、幼児やペットの手の届かないところに保管してください。
 - 補聴器本体またはイヤチップなどを誤って飲みこまないように十分注意して下さい。もし飲み込むような事故があった場合は、直ちに医師に相談ください。
- 注意**
 - 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、車の中など、高温になりやすい環境に補聴器本体及び電池を長時間置かないでください。
 - MRIスキャンは強い磁力を用いる為、故障の原因になります。MRI室には補聴器を持ち込まないでください。レントゲン撮影やCTスキャンなどの画像診断機器は補聴器に悪影響を及ぼす為、撮影時には補聴器を外してください。
 - 補聴器を電子レンジで乾かささないでください。内部の電子部品が破壊されてしまいます。
 - 浴室など、湿気が多い場所に補聴器本体及び電池を放置しないでください。
 - 分解、改造などはしないでください。修理の際は、お求めになられた販売店にご相談ください。
 - 電池のフタを無理に開けたり、閉じたりしないでください。故障の原因になります。


各部のなまえと操作方法



1. ボリュームの調整

ボリュームの数値が大きくなるほど音が大きくなります。

- 警告**
 - ボリュームを上げすぎると、内耳に損傷を与える恐れがあります。販売店に指定された位置で使用して下さい。

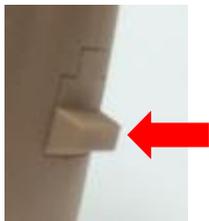

2. メモリーの切り換え

メモリー切り換えスイッチを押すと、メモリーの設定(テレコイル含む)を切り換えることができます。

状況に応じて切り換えて使用してください。
※メモリーの設定は販売店にご相談ください。




3. 電話をかける(テレコイル使用)

メモリー切り換えスイッチでテレコイルに切り換えて、テレコイルで使用します。電話器から直接、誘導信号を入力できますので、電話の音が聞きやすくなります。

- 注意**
 - コードレス電話、または携帯電話には機能しない場合があります。

電池を交換するには

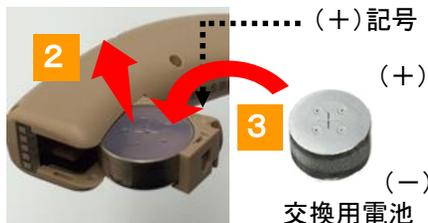


- 1 電池のフタの突起部分に爪をあて、引くように開けます。
- 2 使用済みの電池を取り出します。
- 3 電池のフタには(+)記号が表示されています。電池の(+)記号がついている面を同じ向きにして入れます。
- 4 電池のフタをもとどおりに閉めます。

- 警告**
 - 電池は幼児やペットの手の届かない所に保管してください。
 - 電池を誤って飲み込まないように十分注意してください。
 - 飲み込んでしまった場合、直ちに医師の診断を仰いでください。

- 注意**
 - 使用済み電池はゴミとして捨てないで、販売店にお持ちください。

補聴器を装着するには

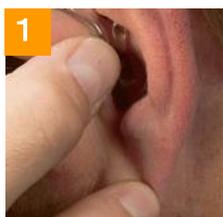

イヤフォーム(耳せん)を耳の穴に入れます。



補聴器本体を耳の上に置きます。



ボリュームを調整します。



装着完了です。

お手入れするには



イヤフックからイヤチューブとイヤフォーム(耳せん)を外します。



付属のブラシや綿棒を使い、付着している耳垢やホコリを取除きます。



柔らかい布で汚れや水分をふき取ります。イヤチューブやイヤフォームに水分が残っていないことを確かめてから、イヤフォームとチューブを接続します。



イヤフォームとチューブが適切な位置になるように調整します。



●イヤチップ、イヤフォームには、使用状況によりカビが発生することがあります。こまめにお手入れをお願いします。

おかしいと思ったら

症状	考えられる原因	対処法
音が聞こえない	○電池切れ	○電池を交換してください。※「電池を交換するには」参照
	○耳栓・マイク孔の目詰まり	○耳栓・マイク孔を掃除してください。※「お手入れをするには」参照
	●機械的な故障	●販売店にご相談ください。
ピーピー音がする	○補聴器が正しく装着されていない	○正しく装着してください。※「補聴器を装着するには」参照
	●機械的な故障	●販売店にご相談ください。
音がとぎれる	○電池の消耗	○電池を交換してください。※「電池を交換するには」参照
	●機械的な故障	●販売店にご相談ください。
音が小さい	○電池の消耗	○電池を交換してください。※「電池を交換するには」参照
	○レシーバ孔の目詰まり	○レシーバ孔を掃除してください。※「お手入れをするには」参照
	○マイク開口部の目詰まり	○マイク開口部を掃除してください。※「お手入れをするには」参照
	●機械的な故障	●販売店にご相談ください。
電池交換後、電池のフタが閉まらない	○電池の極性が逆	○正しい向きに入れてください。※「電池を交換するには」参照
	●補聴器内に異物	●販売店にご相談ください。
	●機械的な故障	●販売店にご相談ください。

医薬品医療機器等法第63条の規定による表示

製造販売業者名：スターキージャパン株式会社
住所：神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23
第2種医療機器製造販売業許可番号：14B2X00027
登録番号：14BZ000426
0120-045-190

区別：管理医療機器
一般の名称：耳かけ型補聴器
認証番号：219ADBZX00153000
製造番号：製品本体記載
販売名：P675デスティニー



MD84856/ISO13485