

イージーフィット30 取扱説明書(耳あな形)

- 警告** 取り扱いを誤った場合、人の死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容です。
- 注意** 取り扱いを誤った場合、人が損傷を負う可能性および物的損害のみの発生が想定される内容です。


安全にお使いいただくために

- 警告**
 - 補聴器本体を、幼児やペットの手の届かないところに保管してください。
 - 補聴器本体またはホワイトワックスガードなどを誤って飲みこまないように十分注意して下さい。もし飲み込むような事故があった場合は、直ちに医師にご相談ください。
- 注意**
 - 直射日光の当たる場所、暖房器具の近く、車の中など、高温になりやすい環境に補聴器本体及び電池を長時間置かないでください。
 - MRIスキャンは強い磁力を用いる為、故障の原因になります。MRI室には補聴器を持ち込まないでください。レントゲン撮影やCTスキャンなどの画像診断機器は補聴器に悪影響を及ぼす為、撮影時には補聴器を外してください。
 - 補聴器を電子レンジで乾かさないでください。内部の電子部品が破壊されてしまいます。
 - 浴室など、湿気が多い場所に補聴器本体及び電池を放置しないでください。
 - 分解、改造などはしないでください。修理の際は、お求めになられた販売店にご相談ください。

フィッティングサービスの重要性

補聴器は適切なフィッティング調整により、その効果が発揮されます。しかし、装用者のきこえの状態によっては、その効果が異なる場合があります。

各部のなまえと記載事項

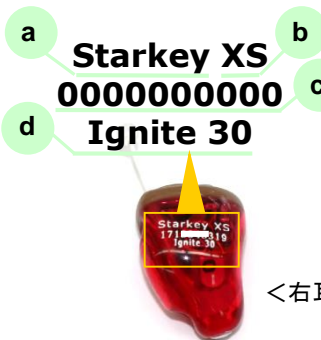

1. 各部のなまえ


- 1 レシーバ孔(出力部)
- 2 マイク(集音部)
- 3 電池のフタ
- 4 挿入/取り出し用ピン(テグス)
- 5 通気孔(ベント)

2. 記載事項

- a 製造メーカー名
Starkey
- b 補聴器のサイズ
XS<S<M
- c シリアルナンバー
00 00 000000
- d 補聴器の名前
Ignite

<右耳用(赤)>

電池を交換するには

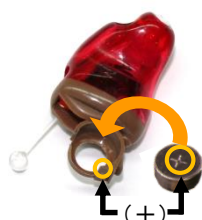

警告



- 電池は幼児やペットの手の届かない所に保管してください。
- 電池を誤って飲み込まないように十分注意してください。飲み込んでしまった場合、直ちに医師の診断を仰いでください。

注意

- 使用済み電池はゴミとして捨てずに、販売店にお持ちください。
- 電源を入れたままにすると、電池寿命が極端に短くなります。補聴器を使用しない時は、電池のフタを半開きにして、電源を切ってください。
- 電池を交換する際には、必ず電池のフタに正しくのせてから、電池のフタを閉めてください。電池をフタにのせずに直接補聴器内に入れると、故障の原因になります。

- 1 電池のフタの突起部分に爪を当て、外に引くようにしてフタを開けます。
- 2 電池の(+)と(-)の向きを確認してから電池のフタに電池を入れます。
- 3 電池のフタを閉めます。電池のフタがうまく閉まらない時は、電池が逆向きに入っていないか、もう一度ご確認ください。

補聴器を装用するには

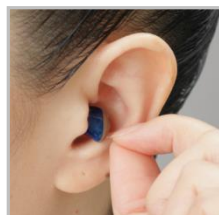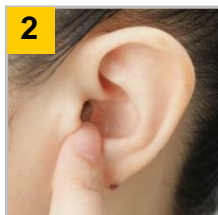

- 1 挿入/取り出し用ピンを、親指と人差し指でつまんで、補聴器を支え、マイクが上になるようにします。そして抵抗感があるまで、ゆっくり耳の中に入れます。
- 2 挿入/取り出し用ピンから指を離し、耳の中にぴったり納まるよう指で軽く押し込みます。この時、耳たぶを軽く下に引いてください。

補聴器を取りはずすには

挿入/取り出し用ピンを指でつまみ、ゆっくり引き出します。

補聴器の操作


1. 電源の入/切



電源入 電池を電池のフタに入れ、閉めると電源が入ります。

電源切 電池のフタを開けると、電源が切れます。

2. 電話をかける時は

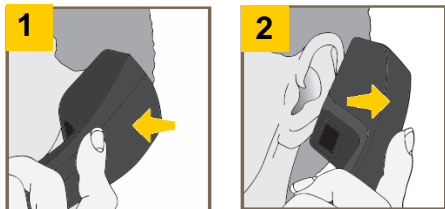

- 1 受話器を耳に近づけると、電話専用の調整に自動的に切り替わります。
- 2 受話器を耳から離すと、通常モードに戻ります。

お手入れをするには

- 補聴器の表面は、乾いた柔らかい布等で拭いてください。
- レシーバ孔、マイク、電池のフタなど、耳垢やホコリのたまりやすい部分は、専用ブラシで毎日掃除をしてください。

おかしいと思ったら

症状	考えられる原因	対処法
音が聞こえない	○電池切れ	○電池を交換してください。※「電池を交換するには」参照
	○耳栓・マイク孔の目詰まり	○耳栓・マイク孔を掃除してください。※「お手入れをするには」参照
	●機械的な故障	●販売店にご相談ください。
ピーピー音がする	○補聴器が正しく装着されていない	○正しく装着してください。※「補聴器を装着するには」参照
	●機械的な故障	●販売店にご相談ください。
音がとぎれる	○電池の消耗	○電池を交換してください。※「電池を交換するには」参照
	●機械的な故障	●販売店にご相談ください。
音が小さい	○電池の消耗	○電池を交換してください。※「電池を交換するには」参照
	○レシーバ孔の目詰まり	○レシーバ孔を掃除してください。※「お手入れをするには」参照
	○マイク開口部の目詰まり	○マイク開口部を掃除してください。※「お手入れをするには」参照
	●機械的な故障	●販売店にご相談ください。
電池交換後、電池のフタが閉まらない	○電池の極性が逆	○正しい向きに入れてください。※「電池を交換するには」参照
	●補聴器内に異物	●販売店にご相談ください。
	●機械的な故障	●販売店にご相談ください。

磁石の取り付け方



- 切り替わりが弱い場合は、磁石を受話器に取り付けてご使用ください。
- 粘着テープで①のようにしっかりと固定してください。②のように、テープ無しでも付く場合には、特に貼り付ける必要はありません。

警告

- 磁石は心臓機器（ペースメーカー、細動除去器、能動型埋込式医療機器など）の医療機器に影響を及ぼす可能性があります。ご使用前に必ず医師にご相談ください。
- 磁石を飲み込んだり、耳の中に落としてしまった場合は、直ちに医師にご相談ください。

注意

- 磁石及び粘着テープは弊社純正品をご使用ください。
- コードレス電話、または携帯電話には機能しない場合があります。
- 磁石を粘着テープで貼り付ける場合には、スピーカーの穴を全てふさがないようにしてください。

注意

- 就寝時など、補聴器をご使用にならないときは、電池を取り出して、補聴器本体を乾燥ケースに入れて保管してください。補聴器から取り出した電池は乾燥ケースに入れずにしてください。
- 補聴器本体は、使用状況によりカビが発生することがあります。こまめにお手入れをお願いします。

医薬品医療機器等法第63条の規定による表示

製造販売業者名：スターキージャパン株式会社
住所：神奈川県横浜市港北区新横浜2-6-23
第2種医療機器製造販売業許可番号：14B2X00027
登録番号：14BZ000426
☎0120-045-190

区別：管理医療機器
一般的名称：耳あな型補聴器
認証番号：223ADBZX00107000
製造番号：製品本体記載
販売名：Xシリーズ耳あな型



MD84856/ISO13485