

## 防塵・防水に関するガイドライン

### スターキー補聴器における、防水・防塵に関する注意事項

スターキーでは、保護等級取得の有無に関わらず、補聴器を水、またはその他の液体物に浸したり、洗ったりすることを推奨していません。また、補聴器は、スチームサウナ、シャワー、また（補聴器に直接触れるような）激しい雨といった湿気の多い状態にさらされることを想定して設計されていません。補聴器をご使用の際は、下記の注意事項を必ずお読みください。

#### 製品の取り扱いにおける注意事項



- 補聴器は水や湿気にさらすと、性能に影響が出る場合があります。
- 補聴器を装用したまま、補聴器の近い位置でヘアスプレー、香水、虫除けスプレーなどを使用しないでください。補聴器の故障の原因になります。
- 補聴器は常に清潔に保つように、補聴器の使用後や保管前には清掃をしてください。

スターキー補聴器をお使いの際は、取扱説明書の「1. 安全にお使いいただくために」の注意事項を必ずお読みの上、補聴器をご使用ください。

## 誤って補聴器を水や湿気にさらしてしまった場合の対処法

誤って水に落としてしまった、または補聴器を水/湿気にさらしてしまった際には、下記の手順に従って対処してください。

- 1 補聴器を水から取り出してください
- 2 電池を取り外してください
- 3 補聴器をきれいな乾いた布でふいてください
- 4 補聴器を5分程度空気にあてて乾かしてください
- 5 新しい電池をセットし、補聴器の電源を入れてください

下記の状況では補聴器を外してください。



シャワーを浴びる時



水泳やダイビング



温泉や海水浴