
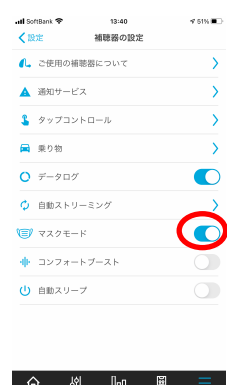
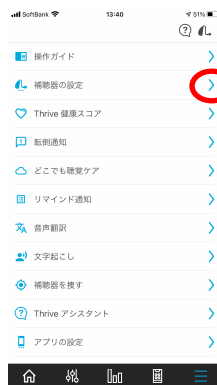



# マスクモードの使用法 (Livio AI/Livio 1200以上対応)


新型コロナウイルスの感染防止にマスクの着用が日常生活で求められる今、マスク越しの会話に聞き取り難さを感じたら、ぜひThriveアプリの新機能「マスクモード」をお試しください。


最新版Thriveアプリ (バージョン 3.1.1) をApp Store (iOS端末)、またはGoogle Play (Android端末) からダウンロードします。お使いのスマートフォンにアプリをインストール後、以下の手順で設定します。

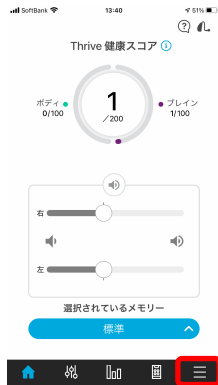


①ホーム画面下部のメニューバーにある  をタップして、設定メニューを開きます。

②「補聴器の設定」横の  をタップします。

③「マスクモード」横  をタップします。有効の場合はボタンが青く表示されます。

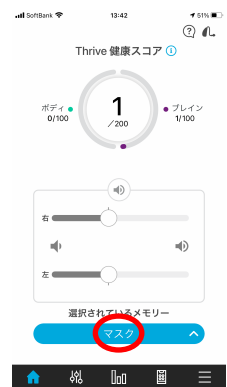


④  をタップしてホーム画面に戻り、メモリーボタンの上矢印をタップします。

⑤設定された補聴器メモリー以外に「カスタムメモリー」に「マスク」が自動追加されます。

⑥「マスク」をタップすると、選択されているメモリーがマスクモードに変更されます。

・AIモデル「Livio AI 1600」クラス以上をご利用の方は、補聴器を最新のソフトウェアに更新すると、音声で補聴器が操作できる「ボイスコマンド」機能が追加できます。補聴器装用中に「マスクモードに変えて」と声に出すだけで補聴器が反応、ハンズフリーでメモリーを切り替えることができます。

ボイスコマンドをご使用になる場合は、以下の設定が必要です。

・音声認識にAmazon Alexa (アマゾン アレクサ) 技術を利用するため、お客様のAmazonアカウントの情報を入力する必要があります。 の「設定メニュー」から「Thriveアシスタント」をタップして、お客様のAmazonアカウントにログインするようにしてください。

・ボイスコマンドは、お客様の音声を補聴器が拾う必要があるため、「設定メニュー」から「補聴器の設定」に進み、「Thriveアシスタントのマイク」は「補聴器のマイク」を選択してください。

