

iOS 端末と補聴器が上手くつながらないときは以下をお試しください

iPhone の機種変更を行った後などにおいて、再び Bluetooth 機器と接続するには、ネットワーク設定をリセットした方が良い場合があります。ネットワーク設定には Bluetooth 設定、WiFi 設定が含まれます。リセットを実行後には再設定が必要になります。再設定に必要な情報（パスワードなど）を事前にご用意の上、ネットワーク設定のリセットを実行するようにしてください。



① 設定アイコンをタップし、下にスクロール。「一般」をタップ。




③ 下にスクロールし、「転送または iPhone をリセット」をタップ。



② 「リセット」をタップ



⑥ 「ネットワーク設定をリセット」をタップ。

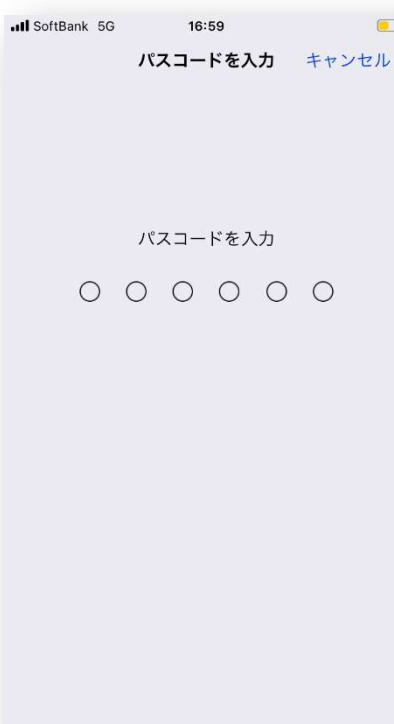

⑤ 端末のパスコードを入力してください。



④ 「ネットワーク設定をリセット」をタップ。Bluetooth 設定がリセットされます。