


Halo シリーズ iOS9 対応のご案内

9月16日に配信されたiOS9より、Made for iPhone 補聴器に着信音がストリーミングできるようになりました。着信音の設定方法や各iOSデバイスの互換性について、下記にご報告させていただきます。iOS9にアップデートすると、HaloとiOSデバイスをペアリングすると「補聴器で着信音を再生」と「オーディオルーティング」の2項目が追加されます。



着信音を設定するためには、まずオーディオルーティングを選択し、「通話オーディオ」にて「常に補聴器を使用」を選択して下さい。

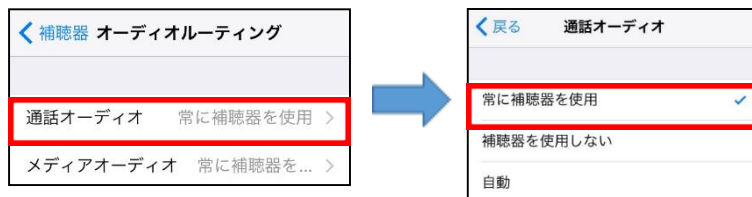

*「メディアオーディオ」はミュージックや YouTube といった音声メディアのストリーミング先の設定になります。

オーディオルーティングには「常に補聴器を使用」「補聴器を使用しない」「自動」の3種類があります。「自動」は、iPhoneがCarPlay(iPhoneと車のテレマステック装置を連動させるシステム)と接続したときは車のスピーカーから着信音が聞こえ、CarPlayと接続していないときは、補聴器から着信音が聞こえるといった、切り換えを自動で行うための機能になります。

着信音の音源はホーム画面>設定>サウンド>着信音にて変更できます。

以下、各iOSデバイスでの着信音ストリーミングの検証結果となります。

【着信音ストリーミングの検証】(2015.9.23 現在)

・使用機種 Halo RIC13、BTE13(※RIC13は性能更新前のものを含む)

	通話	Face Time
iPhone6 Plus	○	○
iPhone5S	○	○
iPad	—	○
iPad air	—	○
iPod touch	—	○